



Precaución

A fin de evitar lesiones, nunca desplace o reubique la camilla con un paciente en ella.




Precaución

A fin de evitar lesiones, bloquee siempre las ruedas antes de llevar a cabo cualquier procedimiento.

Para desplazar la camilla por un umbral...

- A) Alinee la camilla con el umbral como se indica en la imagen.
- B) Haga rodar la camilla por el umbral, una rueda de cada vez.


Nota: Coloque la camilla como se indica en la imagen. (Respaldo subido / Base bajada / Inclinação bajada / Reposapiés bajado).

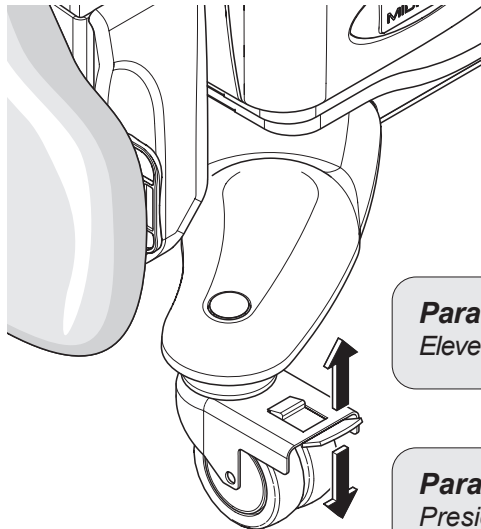

MA8968i

Para DESBLOQUEAR la(s) rueda(s)...
Eleve la palanca de freno.

Para BLOQUEAR la(s) rueda(s)...
Presione hacia abajo la palanca de freno.

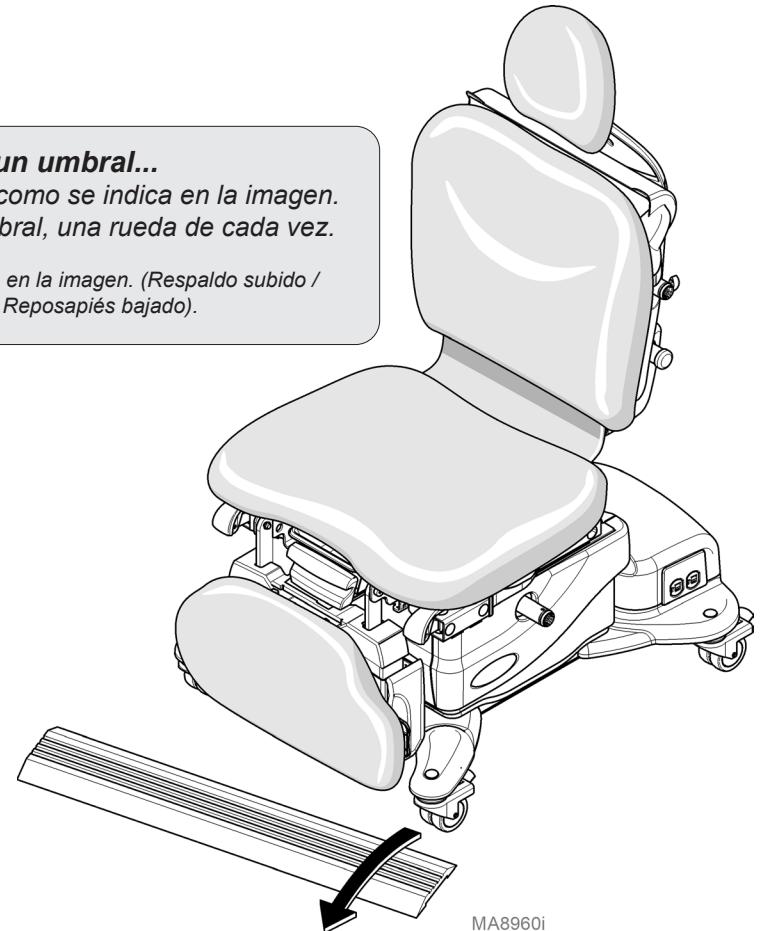

MA8960i