

Guide d'installation Roulettes [9A554]


Modèles concernés :
630 (-010 /-011 /-020 /-021)

Langue d'origine : anglais

Restrictions :

Ne montez pas les roulettes sur une base rotative.

Étape 1 : Débranchez le cordon d'alimentation de la table.

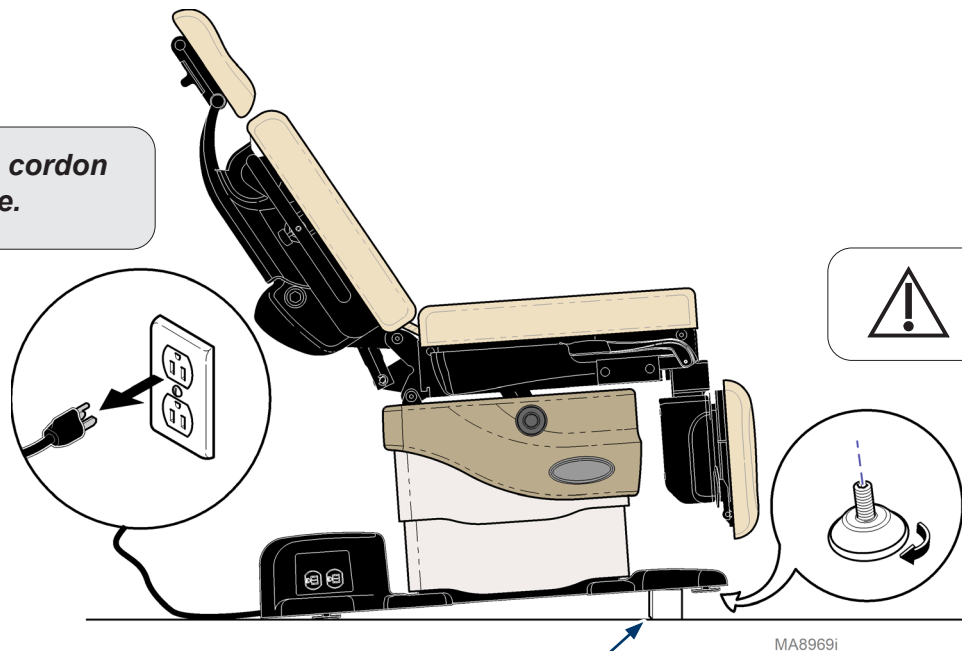

Attention

Cette table pèse environ 215 kg (475 lb). Faites-vous aider pour soulever la table.

Étape 2 : Retirez les vis de mise à niveau.


- Soulevez l'extrémité « pied » de la table.
- Placez un support de 10 x 10 cm (4 x 4 po) sous la base.
- Retirez les vis de mise à niveau.

Support 10 x 10 x 61 cm
(4 x 4 x 24 po)

MA8969i

Étape 3 : Montez les roulettes sur l'extrémité « pied ».

- A) Abaissez le levier de verrouillage pour verrouiller les roulettes.
- B) Insérez la roulette dans le support.
- C) Serrez bien la roulette de manière à ce qu'elle reste en place.

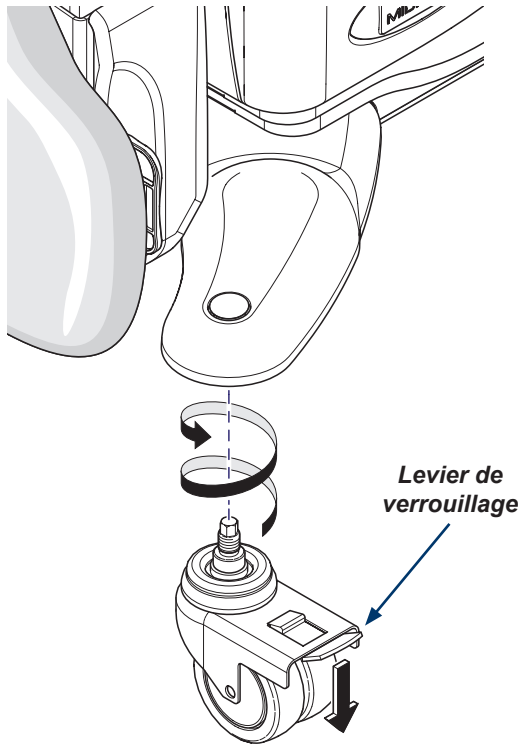

MA8970i

MA8972i



Attention

Pour éviter toute blessure, ne déplacez ou ne repositionnez jamais la table lorsqu'un patient se trouve dessus.



Attention

Pour éviter de vous blesser, verrouillez les roulettes de l'extrémité « pied » avant de passer à l'étape 4.

Étape 4 : Montez les roulettes sur l'extrémité « tête » de la table.


- A) Soulevez l'extrémité « tête » de la table.
- B) Placez un support de 10 x 10 cm (4 x 4 po) sous la base.
- C) Retirez les vis de mise à niveau.
- D) Abaissez le levier de verrouillage pour verrouiller les roulettes.
- E) Insérez la roulette dans le support.
- F) Serrez bien la roulette de manière à ce qu'elle reste en place.

Remarque : Vous trouverez une illustration de référence à la page 1.



Attention

Pour éviter de vous blesser, verrouillez les roulettes avant d'effectuer toute manipulation.

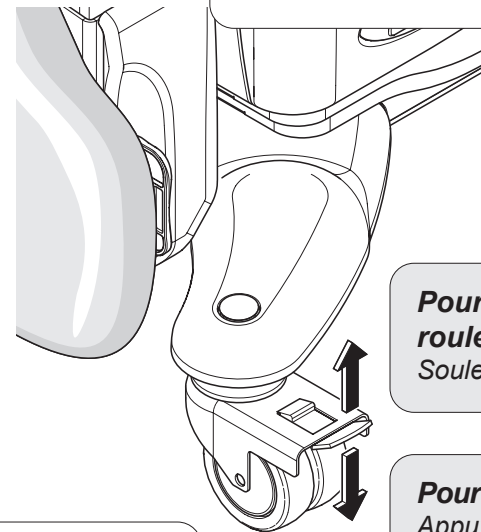

Pour DÉVERROUILLER les roulettes...

Soulevez le levier de verrouillage.

Pour VERROUILLER les roulettes...

Appuyez sur le levier de verrouillage.