

Guía de instalación Ruedas [9A554]

Se aplica a los modelos:


630 (-010 /-011 /-020 /-021)

Idioma de origen: Inglés

Restricciones:

No instale ruedas con base giratoria.

Paso 1: Desenchufe el cable de alimentación de la camilla.

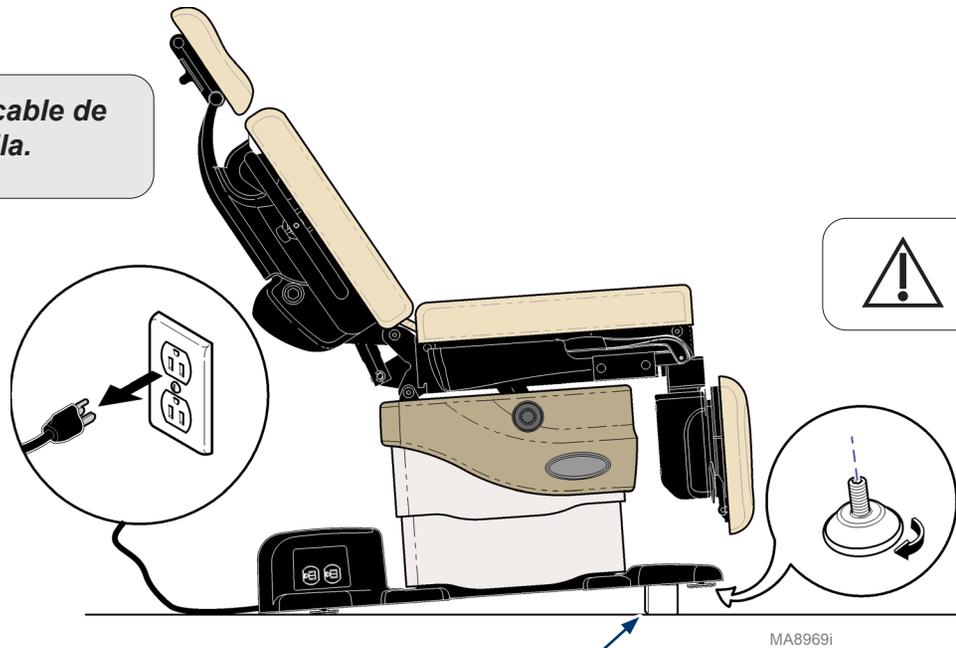

Precaución

Esta camilla pesa aproximadamente 215 kg. (475 lb).
Necesitará un ayudante para levantar la camilla.

Paso 2: Quite los tornillos de nivelación.


- A) Eleve el extremo de los pies de la camilla.
- B) Coloque un soporte 10 x 10 cm (4 x 4 in.) debajo de la base.
- C) Quite dos tornillos de nivelación.

Soporte 10 x 10 x 61 cm
(4 in. X 4 in. X 24 in.)

MA8969i

Paso 3: Instale las ruedas del extremo de los pies.

- A) Presione hacia abajo la palanca de freno para bloquear la rueda.
- B) Atornille la rueda en la base.
- C) Apriete la rueda con firmeza para asegurarla.

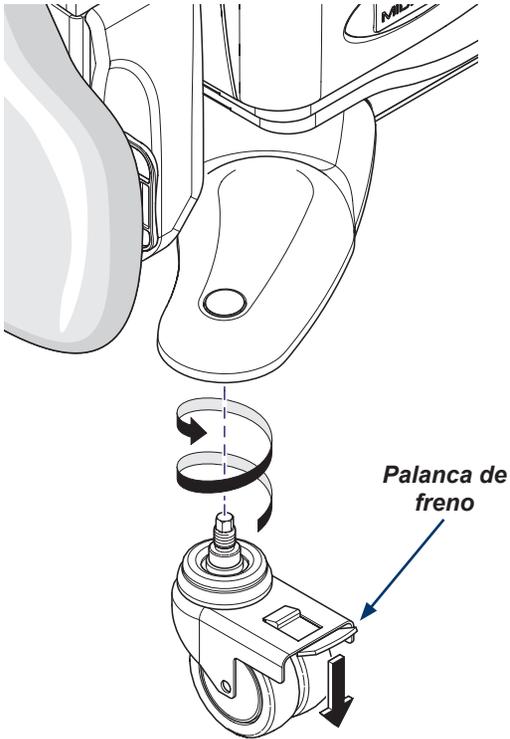

MA8970i

MA8972i



Precaución

A fin de evitar lesiones, bloquee las ruedas del extremo de los pies antes de llevar a cabo el paso 4.

Paso 4: Instale las ruedas del extremo de la cabecera.


- A) Eleve el extremo de la cabecera de la camilla.
- B) Coloque un soporte 10 x 10 cm (4 in. x 4 in.) debajo de la base.
- C) Quite dos tornillos de nivelación.
- D) Presione hacia abajo la palanca de freno para bloquear la rueda.
- E) Atornille la rueda en la base.
- F) Apriete la rueda con firmeza para asegurarla.

Nota: Consulte la ilustración que aparece en la página 1.



Precaución

A fin de evitar lesiones, bloquee siempre las ruedas antes de llevar a cabo cualquier procedimiento.

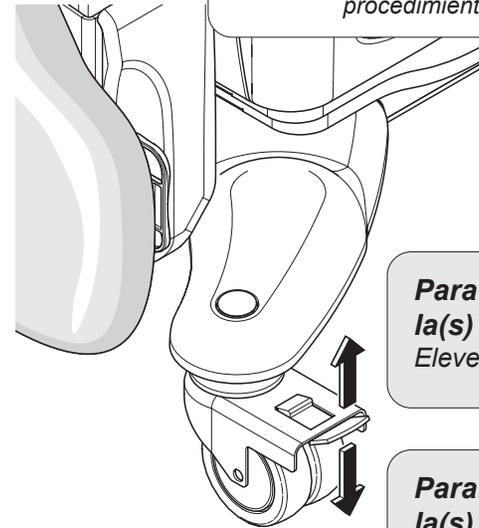

Para DESBLOQUEAR la(s) rueda(s)...
Eleve la palanca de freno.

Para BLOQUEAR la(s) rueda(s)...
Presione hacia abajo la palanca de freno.



Precaución

A fin de evitar lesiones, nunca desplace o reubique la camilla con un paciente en ella.