

Montageanleitung Midmark 630 HumanFORM® Behandlungstisch + Midmark 631-001 Behandlungstisch

Für die Modelle:

630 (-010 bis -013)

630 (-020 bis -023)

631-001

Ausgangssprache: Englisch

Anbringen der Kopfstütze:

- Einstellknopf der Kopfstütze lösen.
- Montagestift in die Kopfstützenverankerung stecken.
- Kopfstütze in die gewünschte Position bringen.
- Einstellknopf der Kopfstütze feststellen.

Optionale Kopfstützenausführungen

(Hinweis: Montage ist gleich)

