

Guía de instalación Sillón de tratamiento Midmark 630 HumanFORM® + Sillón de tratamiento Midmark 631-001

Se aplica a los modelos:

630 (-010 a -013)

630 (-020 a -023)

631-001

Idioma original: Inglés

Para instalar el conjunto del reposacabezas...

- Afloje la perilla de ajuste del reposacabezas.
- Inserte el perno de montaje en la pieza de sujeción del reposacabezas.
- Coloque el reposacabezas en la posición deseada.
- Apriete la perilla de ajuste del reposacabezas.

Estilos opcionales de reposacabezas

(Nota: la instalacion es idéntica)

