


Para retirar el soporte del control manual ya existente...


- A) Afloje la perilla.
- B) Retire el soporte del control manual ya existente.

Nota: Si el casquillo incluye una tapa protectora, retírela.

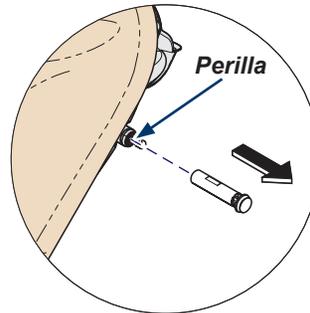

Nota

El eje ranurado incluye una chaveta.
Gire el riel para accesorios hasta que se deslice dentro del casquillo.

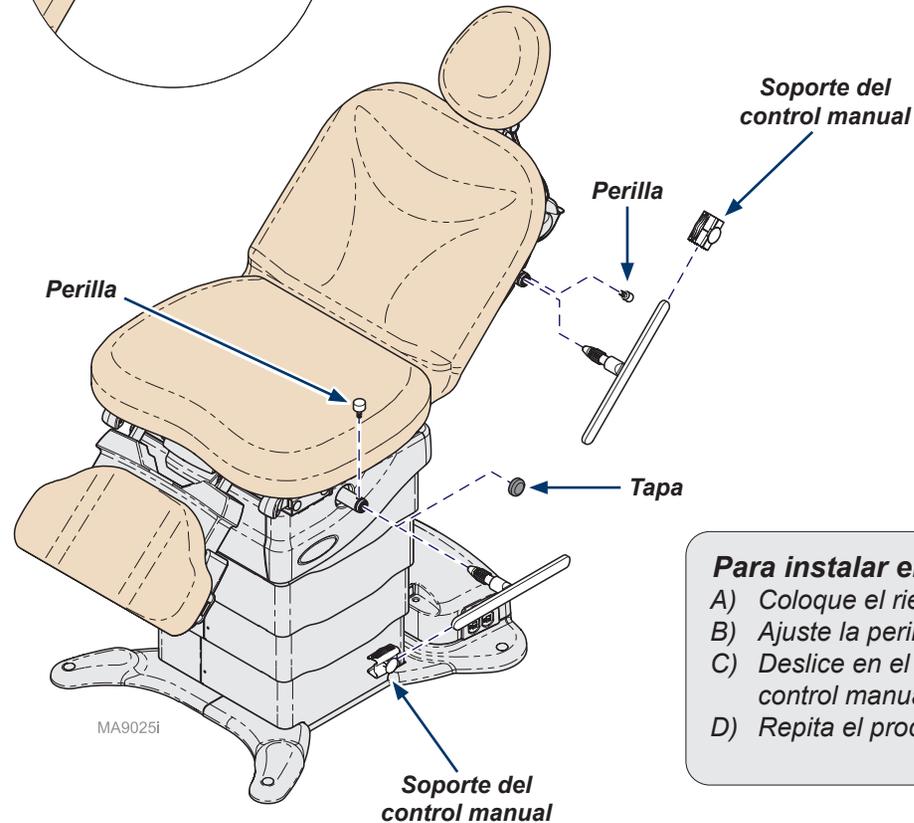

Para instalar el riel para accesorios...

- A) Coloque el riel en el sitio deseado.
- B) Ajuste la perilla.
- C) Deslice en el riel el soporte del nuevo control manual.
- D) Repita el procedimiento en el otro lado.

MA9025i