


 Ausgangsposition	<p>Der Startbildschirm wird angezeigt, wenn der Hauptschalter EINGESCHALTET wird; Symbole werden angezeigt, wenn die Software mit den einzelnen Komponenten kommuniziert.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;"> Benutzer ändern Version der Steuer- software ansehen Seriennummer des Dentalsystems ansehen </p> <p>Der Startbildschirm geht nach einem bestimmten Zeitraum ohne Aktivität in den Sleep-Modus (schwarzer Bildschirm) über.</p>
Komponenten- symbole	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div> Patientenstuhl</div> <div> Assistenzele- ment</div> <div> Elektro- motor</div> <div> Konfiguration (Benutzereinstellungen und Vorgabedaten)</div> <div> Uhr</div> <div> Schnittstellenplatine (Softwareversion)</div> <div> Erweiterte E/A</div> <div> USB</div> </div>
Statussymbole	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div> Bereit</div> <div> Problem</div> <div> Keine Kommunikation</div> <div> Option nicht angeschlossen</div> </div> <p>Die Komponenten funktionieren nur, wenn sie mit einem gekennzeichnet sind.</p>
Benutzerein- stellungen	<p>Durch Drücken von wird eine aufgelistete Einstellung hervorgehoben.</p> <p>Durch Drücken von werden die Optionen für die hervorgehobene Einstellung aufgerufen.</p> <p>Durch Verwendung der von den Hilfsanzeigen auf den einzelnen Bildschirmen angezeigten Tasten wird eine bzw. werden aktive Option(en) hervorgehoben und eingestellt.</p> <p>Tip: Schauen Sie die Hilfsanzeigen an, um zu sehen, welche Tasten bei welchem Bildschirm aktiv sind.</p> <div style="text-align: right;"> </div> <p>Sie können die automatische Speicherung der Vorgaben EIN- (<input checked="" type="checkbox"/> = EIN (Standard)) oder AUSSCHALTEN (<input type="checkbox"/> = AUS).</p> <p>Wenn die automatische Speicherung der Vorgaben EINGESCHALTET ist, wird jede Reglereinstellung, die Sie ändern, für diese(n) Benutzer/Vorgabe automatisch gespeichert.</p> <p>Wenn die automatische Speicherung der Vorgaben AUSGESCHALTET ist, können Sie die Einstellungen wiederholt ändern, ohne sie unter der Nummer für diese(n) Benutzer/Vorgabe zu speichern, oder Sie können auf die Eingabeaufforderung Speichern antworten, um die neue Einstellung zu speichern.</p> <p>ODER heben Sie „Beenden“ hervor und kehren Sie durch Drücken von auf den Startbildschirm zurück.</p>
Programmieren der Stuhlpositionen	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p style="text-align: center;">Positionstasten</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <p>Die Tasten und an einem beliebigen Steuergerät verwenden, um den Stuhl in die gewünschte Position zu bewegen.</p> <p>Drücken Sie eine Positionstaste (oder) und halten Sie diese zwei Sekunden lang. Warten Sie, bis der Stuhl drei Signaltöne abgibt. (Dies zeigt an, dass die aktuelle Position für die Taste programmiert ist.)</p> <p>Bringen Sie den Stuhl mithilfe der Tasten und in eine andere Position.</p> <p>Drücken Sie die zuvor programmierte Positionstaste und bestätigen Sie, dass sich der Stuhl in diese Position bewegt.</p> <p>Hinweis: Jeder Benutzer kann seine eigene Auswahl an programmierten Stuhlpositionen programmieren. Daher stets die Angabe über den <u>aktiven Benutzer</u> auf dem Bildschirm überprüfen, bevor eine programmierte Position aufgerufen wird.</p> </div> </div>
Bildschirme für den Spülbetrieb	Verwendung: <p>Das Menü für den Spülbetrieb wird angezeigt, wenn zwei oder mehr intelligente Handstücke herausgezogen werden.</p> <p>Mit eine Option hervorheben und drücken, um diese Option auszuwählen. Der Spülwahl-Bildschirm wird angezeigt.</p> <p>Mit eine Option hervorheben und dann drücken, um die Spüldauer zu ändern.</p> <p>Die gewünschte Option durch Drücken von auswählen/starten. Der Spülprozess-Bildschirm wird aufgerufen und zeigt den Status des Spülbetriebs an. Der Bildschirm „Spülung abgeschlossen“ wird angezeigt, wenn der Spülvorgang beendet ist.</p> <p>Hinweis: Die Spritzenspülung wird manuell betrieben. Der Knopf für das Spritzenwasser muss für die gesamte auf dem Spülprozess-Bildschirm angezeigte Spüldauer gedrückt werden.</p> <p>Durch Betätigen von (AUSWÄHLEN) zum Spülwahl-Bildschirm zurückkehren.</p> <p>Durch Drücken von wird „Beenden“ hervorgehoben. Dann drücken, um diese Option auszuwählen. Das Spülbetrieb-Menü wird angezeigt.</p> <p>Mit wird „Beenden“ hervorgehoben. Dann drücken, um diese Option auszuwählen und zum Startbildschirm zurückzukehren.</p> <p>Hinweis: Alle Handstücke müssen wieder in die Halter eingehängt werden, um den Spülbetrieb zu beenden.</p>

Verwendung der Steuerbildschirme der intelligenten Handstücke:

Luftturbine im Normalmodus

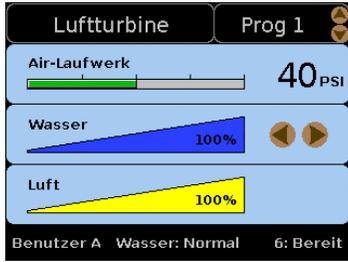

Wird angezeigt, wenn ein Handstück einer Luftturbine herausgezogen wird. Aktive Reglerelemente: **Vorgabename** und **Wassereinstellung**.

Im Normalmodus:

Durch Drücken von die aktive Vorgabe ändern, sofern gewünscht. Mit wird die aktive Einstellung geändert.

Durch Drücken von wird zwischen dem Normal- und dem Editiermodus umgeschaltet.

Im Editiermodus: (Bildschirm nicht abgebildet)


Die aktiven Reglerelemente werden durch Hilfsanzeigen und Hervorheben angezeigt. Durch Drücken von wird eine andere Reglereinstellung als aktiv markiert. Mit wird die aktive (hervorgehobene) Einstellung geändert.

- Wenn die automatische Speicherung EINGESCHALTET ist, werden auf dem Bildschirm vorgenommene Änderungen automatisch für die angezeigte Vorgabe gespeichert. Eine Beschreibung, wie die automatische Speicherung ein-/ausgeschaltet wird, finden Sie in den Benutzereinstellungen.
- Das Fußpedal betätigen, um ein herausgezogenes Handstück zu betreiben.

Den Wasserstatus auf den Bildschirmen überwachen. Mit die Wasserzufuhr auf „Normal“ (Steuerung über den Wahlschalter am Fußpedal) oder auf „Ein“ schalten.

Speicherung von Reglereinstellungen, wenn die automatische Speicherung der Vorgaben ausgeschaltet ist

- Drücken Sie und halten Sie diese Taste gedrückt (2 Sekunden), während die Nummer der Vorgabe zur Eingabeaufforderung Speichern? wechselt.
- Unten auf dem Bildschirm blinkt eine Meldung mit der Anzeige „Einstellungen gespeichert“ auf, dann kehrt die Anzeige zum normalen Modus zurück.
- Wenn Sie die geänderten Einstellungen nicht speichern, blinkt die Eingabeaufforderung Speichern? weiterhin.

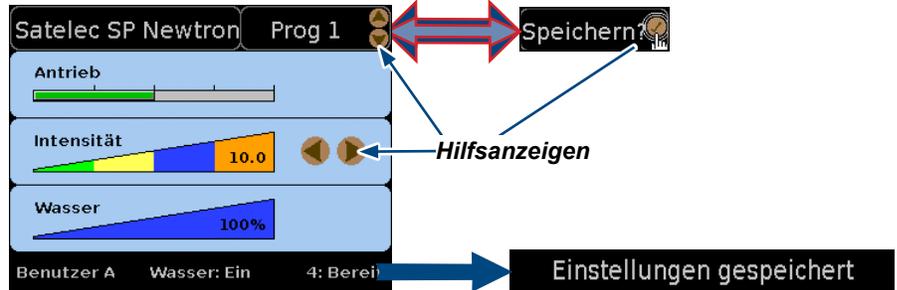

Hinweis:

Die Standardoption ist die automatische Speicherung der Vorgaben, das heißt, sobald Sie eine Einstellung verändern, wird diese als aktive Vorgabe für den aktiven Benutzer gespeichert. Schalten Sie diese Option im Benutzereinstellungsmenü EIN oder AUS.

Steuerbildschirm für Bien Air Elektromotor – Editiermodus

Wird angezeigt, wenn ein Bien Air Handstück herausgezogen und gedrückt wird.

Bezeichnung des Handstücks


Speed – Anzeige der max. Drehzahl im Ruhezustand und der aktuellen Drehzahl bei gedrücktem Fußpedal
Blauer Balken – Anzeige der Drehzahl
Grüner Balken – Anzeige des Drehmoments

Moment

% des maximalen Drehmomentwerts
Optionen für Auto Aus/Auto Vorwärts/Auto Rückwärts
Auto Ein-Dauer – wird nur bei „Auto Vorwärts“ angezeigt

Wasser – Zeigt % des Durchflusses an
Blauer Bereich zeigt aktuellen Durchfluss an

Hinweis: Bei der Betriebsumgebung „Endo“ wird die Wasserzufuhr automatisch ABGESTELLT.

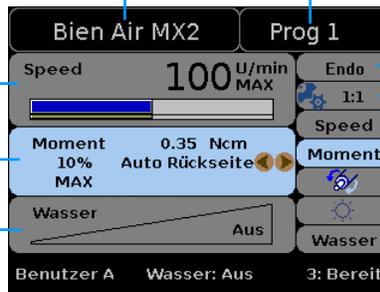

Vorgabename – Fünf Voreinstellungen pro Benutzer

Oper/Endo – Zum Umschalten für die Betriebsumgebung

Winkelstück-Verhältnis – Auf dem Bildschirm angezeigte Angaben für Farbe und Verhältnis müssen stets den auf dem verwendeten Winkelstück eingetragenen Angaben für Farbe und Verhältnis entsprechen.

Zunehmend Direkt Abnehmend

Drehrichtung des Motors – Vorwärts (Blau) Rückwärts (Rot)

Leuchte – Zum Umschalten zwischen Leuchte AUS Leuchte EIN


Bien Air Elektromotor – Bildschirm für Verhältniseinstellung

wird angezeigt, wenn 1:1 im Editiermodus aktiv ist und + gedrückt wird.

Verhältnisse anzeigen und auswählen


Die mit einem X markierten Verhältnisse sind die im Editiermodus angezeigten verfügbaren Optionen für Winkelstück-Verhältnisse.

Benutzerdefiniertes Verhältnis hinzufügen

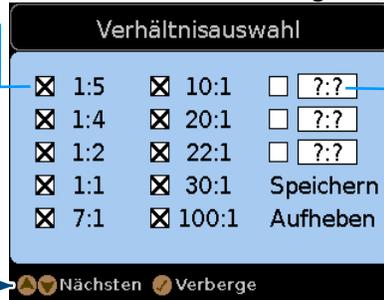

Hilfsanzeigen

Fehlerbildschirm

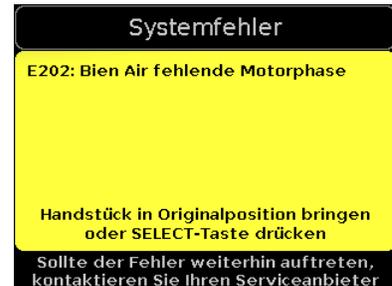

Wird angezeigt, wenn ein Fehler erkannt wird. Die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Wenn sich der Fehler nur auf ein spezifisches Handstück bezieht, sollte die Funktion der anderen Handstücke nicht beeinträchtigt sein.

Softwareversion
v1.2.x