


Accueil	L'écran Accueil apparaît lorsque l'interrupteur principal est mis sur MARCHE ; les icônes apparaissent lorsque le logiciel communique avec chacun d'entre eux. Après une période d'inactivité, l'écran passe automatiquement en mode veille (écran noir).
Icônes de composant	
Icônes d'état	Prêt Il y a un problème Pas de communication Option non connectée Les composants ne fonctionnent que lorsqu'ils sont accompagnés d'une .
Configuration Utilisateur P + pour y accéder. (Chaque utilisateur a une configuration différente.)	Appuyez sur pour mettre une configuration de la liste en surbrillance. Appuyez sur pour accéder aux options de la configuration en surbrillance. Mettez en surbrillance et activez la/les option(s) active(s) à l'aide des boutons indiqués par les aides sur chaque écran. Conseil : Regardez les aides pour voir les boutons actifs pour chaque écran. Vous pouvez ACTIVER l'Enregistrement automatique (☒ = ACTIVE (par défaut)) ou le DESACTIVER (☐ = DESACTIVE). Lorsque l'Enregistrement automatique est ACTIVE, chaque paramètre de contrôle que vous modifiez est sauvegardé automatiquement pour cet Utilisateur/Préréglage. Lorsque l'Enregistrement automatique est DESACTIVE, vous pouvez changer les paramètres de manière répétée sans les sauvegarder pour cet Utilisateur/Préréglage ou vous pouvez répondre à l'invitation Sauver pour enregistrer le nouveau réglage. OU mettre en surbrillance Quitter et appuyer sur pour revenir à l'écran Accueil.

Programmer les positions du fauteuil

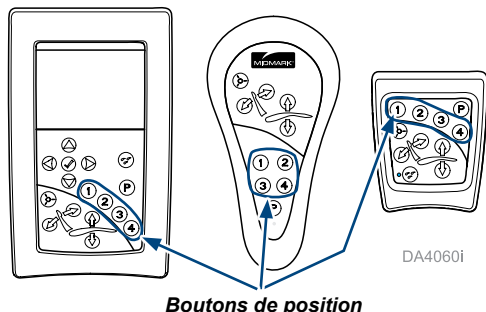

Utilisez les boutons et sur n'importe quel dispositif de commande pour placer la chaise dans la position souhaitée.

Appuyez sur le bouton de position (1 2 3 ou 4) et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.


Attendez que le fauteuil émette trois bips. (Indique que la position courante est programmée sur le bouton.)

Utilisez les boutons et pour mettre le fauteuil dans une autre position.

Appuyez sur le bouton de position que vous venez de programmer et vérifiez que la chaise se remet dans la position correspondante.

Remarque : Chaque utilisateur peut programmer ses propres positions de fauteuil. Notez toujours l'utilisateur actif à l'écran avant d'utiliser une position programmée.

Écrans des Opérations de vidange

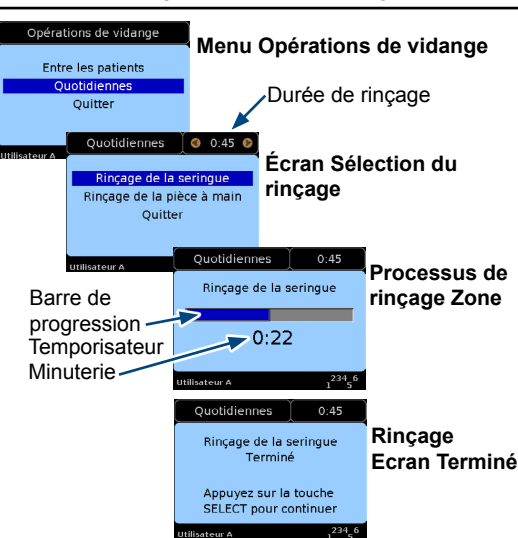

Utilisation :

Le menu Opérations de vidange s'affiche lorsque deux pièces à main intelligentes ou plus sont retirées.

Appuyez sur pour mettre une option en surbrillance et appuyez sur pour sélectionner. L'écran Sélection du rinçage s'affiche.

Appuyez sur pour mettre une option en surbrillance et sur pour modifier le temps de rinçage.

Appuyez sur pour sélectionner/initier l'option. L'écran Processus de rinçage s'affiche et indique la progression du rinçage. L'écran Rinçage de la seringue Terminé s'affiche lorsque le rinçage est terminé.

Remarque : Le rinçage de la seringue est manuel. Vous devez maintenir le bouton d'eau de la seringue enfoncé pendant toute la durée affichée sur l'écran Processus de rinçage.

Appuyez sur (SELECT) pour revenir à l'écran Sélection du rinçage.


Appuyez sur pour mettre Quitter en surbrillance et appuyez sur pour sélectionner. Le menu Opérations de vidange s'affiche.

Utilisez pour mettre Quitter en surbrillance et appuyez sur pour sélectionner et revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : Toutes les pièces à main doivent être remises sur leurs supports pour quitter l'opération de rinçage.

Utilisation des écrans de contrôle Pièce à main intelligente :

Turbine à air en mode Normal

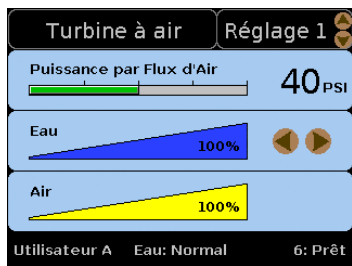

S'affiche lorsqu'une pièce à main Turbine à air est retirée de son support. Commandes actives : Nom de pré-réglage et Réglage de l'eau.

En mode Normal :

Appuyez sur pour modifier le nom pré-réglé actif, si vous le désirez.
Appuyez sur pour changer le paramètre actif.

Appuyez sur pour basculer entre les modes Normal et Modifier.

En mode Modifier :
(écran non illustré)


Des aides et une surbrillance apparaissent sur les contrôles actifs.
Appuyez sur pour activer un paramètre différent.
Appuyez sur pour modifier le paramètre actif (mis en surbrillance).

- Lorsque Enregistrement automatique est ACTIVE, les changements réalisés à l'écran sont automatiquement sauvegardés pour le Pré-réglage affiché. Voir Configuration Utilisateur pour connaître la méthode d'Activation/Désactivation de l'Enregistrement automatique.
- Appuyez sur la pédale pour actionner une pièce à main retirée de son support.

Observez le statut de l'eau sur les écrans. Utilisez pour faire basculer l'eau entre Normal (contrôlé par le sélecteur sur la pédale) et Marche.

Paramètres de contrôle des enregistrements lorsque l'Enregistrement automatique est désactivé...

- Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée (2 sec.) jusqu'à ce que la valeur prédéfinie # et l'invitation Sauver ? clignotent en alternance.
- Un message clignote dans le bas de l'écran pour indiquer Réglages enregistrés, puis revient à la normale.
- Si vous ne sauvegardez pas les paramètres modifiés, l'invitation Sauver ? continue de clignoter.

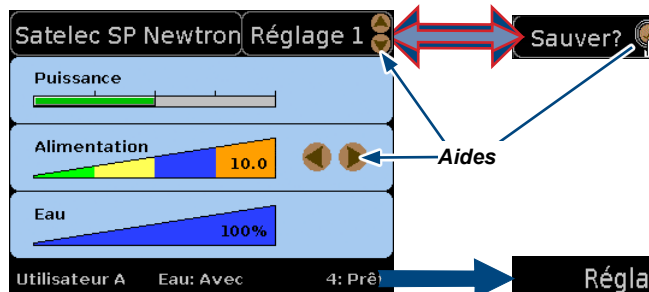

Remarque :

L'option par défaut est réglée sur Enregistrement automatique, autrement dit, dès que vous changez un paramètre, il est automatiquement enregistré comme le pré-réglage actif pour l'utilisateur actif. Le menu Configuration utilisateur permet d'ACTIVER l'option DESACTIVEE.

Écran de contrôle du moteur électrique Bien Air – Mode MODIFIER S'affiche lorsqu'une pièce à main Bien Air est retirée de son support et que la case est cochée.

Nom de la pièce à main

Vitesse – la valeur indiquée est le régime maximum à l'arrêt et le régime courant lorsque la pédale est pressée
Barre bleue – indique la vitesse
Barre verte – indique le couple

Couple


% du maximum Valeur du couple
Options Arrêt automatique / Marche avant automatique / Marche arrière automatique
Horloge Marche automatique – s'affiche uniquement pour la marche avant automatique

Eau

montre le % du débit

Le remplissage bleu indique le débit réel

Remarque : L'eau est en position d'ARRÊT forcé en environnement Endo.

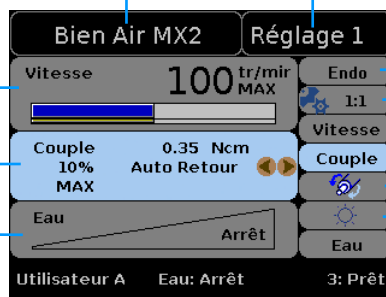

Nom pré-réglage – cinq pré-réglages par utilisateur

Oper / Endo – basculement de l'environnement

Rapport du contre-angle – la couleur et le rapport doivent toujours correspondre au rapport et à la couleur gravés sur le contre-angle utilisé.

Augmentation Direct Diminution

Direction rotationnelle du moteur –

Marche avant (bleue)
Marche arrière (rouge)

Éclairage – basculement

Éclairage ARRETE

Éclairage en MARCHÉ


Moteur électrique Bien Air – Écran de choix de la vitesse

s'affiche lorsqu'en mode Modifier, 1:1 est actif et que + sont appuyés.

Affichage et sélection des vitesses à afficher


Les vitesses accompagnées d'un X sont celles disponibles dans les options des rapports du contre-angle affichées en mode Modifier.

Ajouter une vitesse personnalisée

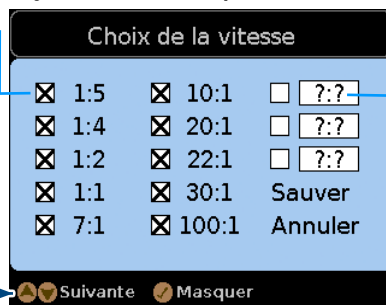

Aides

Écran Erreur

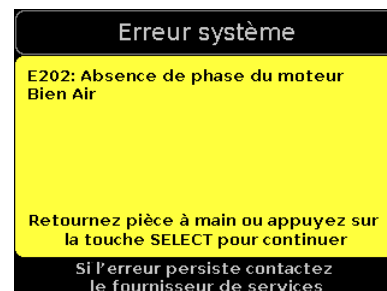

S'affiche lorsqu'une erreur est détectée. Suivez les instructions affichées. Si l'erreur est spécifique à une pièce à main, le fonctionnement des autres pièces à main ne devrait pas être affecté.

Version du logiciel
v1.2.x