


<p><b>Schermata iniziale</b></p>	<p>La schermata iniziale compare quando l'interruttore principale è in posizione On; le icone compaiono quando il software comunica con ciascuna.</p> <p><b>Visualizza numero seriale dell'unità di erogazione</b></p>
<p><b>Icone dei componenti</b></p>	
<p><b>Icone di stato</b></p>	<p>  Pronto   Problema   Assenza di comunicazione   Opzione non connessa         </p> <p>I componenti sono funzionanti solo quando presentano il simbolo .</p>
<p><b>Configurazione</b></p> <p><b>P</b> +  per accedere.</p> <p>(Ogni utente può avere una diversa configurazione).</p>	<p>Premere  per evidenziare una configurazione dall'elenco.</p> <p>Premere  per accedere alle opzioni per la configurazione evidenziata.</p> <p>Evidenziare e impostare le opzioni attive utilizzando i pulsanti indicati dalle frecce di aiuto in ogni schermata.</p> <p><b>Suggerimento:</b> Fare riferimento alle frecce di aiuto per vedere quali sono i pulsanti attivi per ciascuna schermata.</p> <p>È possibile attivare Salva automaticamente ( <input checked="" type="checkbox"/> = On (predefinito) ) o disattivare ( <input type="checkbox"/> = Off ). Quando Salva automaticamente è attivo, ogni modifica delle impostazioni di controllo viene salvata automaticamente nel relativo Utente/Prog specifico. Quando Salva automaticamente non è attivo, è possibile modificare ripetutamente le impostazioni senza salvarle nell'Utente/Prog specifico, oppure è possibile rispondere al comando Salva? per salvare la nuova impostazione. Oppure evidenziare Esci e premere  per tornare alla schermata iniziale.</p>

<p><b>Programmazione posizioni poltrona</b></p> <p><b>Pulsanti Posizione</b></p>	<p>Usare i pulsanti  e  su qualsiasi dispositivo di controllo per portare la poltrona alla posizione desiderata.</p> <p>Tenere premuto un tasto di posizione ( 1 2 3 o 4 ) per due secondi.</p> <p>Attendere che la poltrona emetta il segnale acustico per tre volte (a indicazione del fatto che la posizione corrente è stata programmata nel pulsante).</p> <p>Usare i pulsanti  e  per porre la poltrona in una posizione diversa.</p> <p>Premere il pulsante appena programmato e verificare che la poltrona si porti nella posizione corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Ogni utente può programmare il proprio gruppo di posizioni della poltrona. Notare sempre qual è l'utente attivo nella schermata prima di richiamare una posizione programmata.</p>
--	--

<p><b>Schermate Operazioni di risciacquo</b></p> <p><b>Menu Operazioni di risciacquo</b></p> <p><b>Schermata Selezione del risciacquo</b></p> <p><b>Schermata Processo di risciacquo</b></p> <p><b>Schermata Risciacquo completato</b></p>	<p><b>Utilizzo</b></p> <p>Quando vengono sollevati due o più manipoli intelligenti compare il menu Operazioni di risciacquo.</p> <p>Premere  per evidenziare un'opzione e poi  per selezionarla. Compare la schermata Selezione risciacquo.</p> <p>Premere  per evidenziare un'opzione e  per modificare il tempo di risciacquo.</p> <p>Premere  per selezionare/iniziare l'opzione. Compare la schermata Processo di risciacquo che indica l'avanzamento dell'operazione di risciacquo. Al termine dell'operazione compare la schermata Risciacquo completato.</p> <p><b>Nota:</b> Il risciacquo della siringa è manuale. Tenere premuto il pulsante dell'acqua sulla siringa per l'intero periodo di tempo visualizzato nella schermata Processo di risciacquo.</p> <p>Premere  (SELEZIONA) per tornare alla schermata Selezione risciacquo.</p> <p>Usare  per evidenziare Esci e premere  per selezionare. Compare il menu Operazioni di risciacquo.</p> <p>Usare  per evidenziare Esci e poi  per selezionarlo e tornare alla schermata Home (Iniziale).</p> <p><b>Nota:</b> Per uscire dall'operazione di risciacquo tutti i manipoli devono essere riposti sugli alloggiamenti.</p>
--	---

## Utilizzo delle schermate di controllo dei manipoli intelligenti:

### Turbina ad aria nella modalità Normale

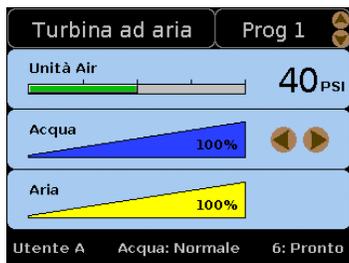

Compare quando viene sollevato un manipolo della turbina ad aria. Controlli attivi: Impostazioni predefinite e Impostazione acqua.

In modalità Normale:

Premere per modificare le impostazioni predefinite attive, se lo si desidera.  
Premere per modificare l'impostazione attiva.

Premere per alternare le modalità Normale e Modifica.

In modalità Modifica:  
(schermata non mostrata)

Sui controlli attivi compaiono le Frecce di aiuto e l'evidenziatura.  
Premere per attivare un'impostazione di controllo differente.  
Premere per modificare l'impostazione attiva (evidenziata).


- Quando Salva automaticamente è ATTIVO, le modifiche effettuate su una schermata vengono automaticamente salvate nell'impostazione predefinita mostrata. Fare riferimento a Configurazione per le modalità di attivazione e disattivazione di Salva automaticamente.
- Premere il pedale per utilizzare il manipolo sollevato.

Osservare lo stato dell'acqua sulle schermate. Usare per alternare l'acqua fra le modalità Normale (controllata dal selettore sul pedale) e On.

### Salvataggio delle impostazioni di controllo quando

#### Salva automaticamente è disattivato...

- Tenere premuto (per 2 sec.) quando Prog. # lampeggia alternativamente con il comando Salva? .
- Un messaggio lampeggia in fondo alla schermata per segnalare Impostazioni salvate, quindi torna alla modalità normale.
- Se non si salvano le impostazioni modificate, il comando Salva? continua a lampeggiare.

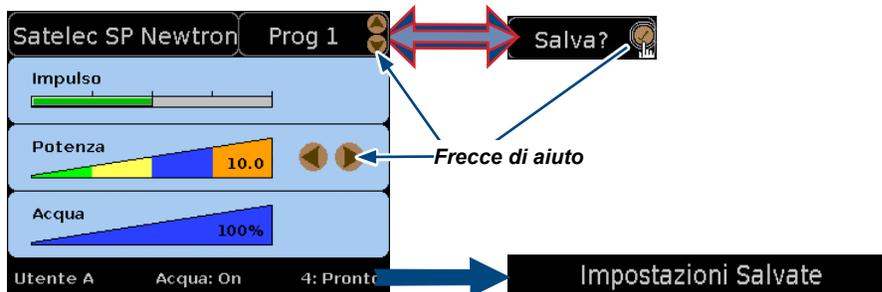

#### Nota:

L'opzione predefinita è Salva automaticamente, ovvero non appena si modifica un'impostazione essa viene automaticamente salvata come impostazione predefinita attiva per l'utente attivo. Attivare o disattivare l'opzione dal menu Configurazione.

### Schermata di controllo motore elettrico Bien Air - Modalità MODIFICA

Compare quando viene sollevato un manipolo Bien Air e viene premuto .

#### Nome del manipolo

**Velocità** - il valore mostrato sono i giri/min (rpm) max. al regime minimo e i giri/min effettivi quando si preme il pedale  
La barra blu indica la velocità  
La barra verde indica la coppia

#### Coppia

% del massimo valore della coppia  
Opzioni Auto Off / Auto Avanti / Auto Invertire  
Il tempo Auto On compare solo per Auto Avanti

#### Acqua

mostra la % del flusso  
Il riempimento blu indica il flusso effettivo **Nota: nell'ambiente Endo l'acqua rimane su OFF (chiusa).**



**Impostazioni predefinite** - cinque impostazioni predefinite per utente

**Oper / Endo** - commutazione ambiente

**Rapporto di contrangolo** - il colore e il rapporto indicati nell'impostazione su schermo devono sempre coincidere con il rapporto e il colore incisi sul contrangolo utilizzato.

Aumento Diretto Diminuzione

**Direzione di rotazione del motore** -

Avanti (Blu) Inversa (Rosso)

**Luce** - commutazione

Luce Off Luce On

### La schermata Motore elettrico Bien Air - Selezione rapporto

compare quando in modalità Modifica 1:1 è attivo e + vengono premuti.


#### Vedere e scegliere i rapporti da visualizzare

I rapporti con una X sono quelli disponibili tra le opzioni Rapporto contrangolo visualizzate in modalità Modifica.

#### Aggiunta di un rapporto personalizzato



### Schermata di errore

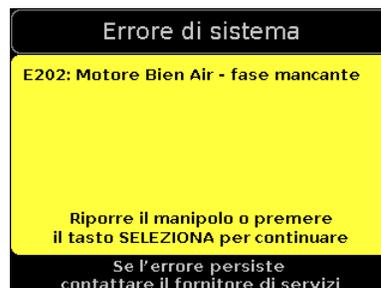

Compare quando viene rilevato un errore. Seguire le istruzioni su schermo. Se l'errore è specifico di un manipolo, il funzionamento degli altri manipoli non dovrebbe esserne interessato.

Versione del software  
v1.2.x