

# Sitzschiene (71 cm, 28 in) [9A567]

**Gültig für die Modelle:**

630 (-010 bis -013)  
630 (-020 bis -023)  
631-001

Herkunftssprache: Englisch

## Hinweis

Sitzschienen an beiden Seiten montieren (eine Seite abgebildet).

## 630-Modelle

### Schritt 1: Bereich vorbereiten.

- Oberes Polster abnehmen.
- Neigungswinkel nach Bedarf anpassen.




### WARNUNG

Den Stuhl stets von der Stromversorgung trennen, bevor die Abdeckungen entfernt werden. Nichtbefolgung kann zu Verletzungen führen.

### Schritt 2: Abdeckungen entfernen.

- Schraube unterhalb der Seitenabdeckung entfernen.
- Seitenabdeckung entfernen.
- Die beiden Stopfen aus der Bohrung entfernen.

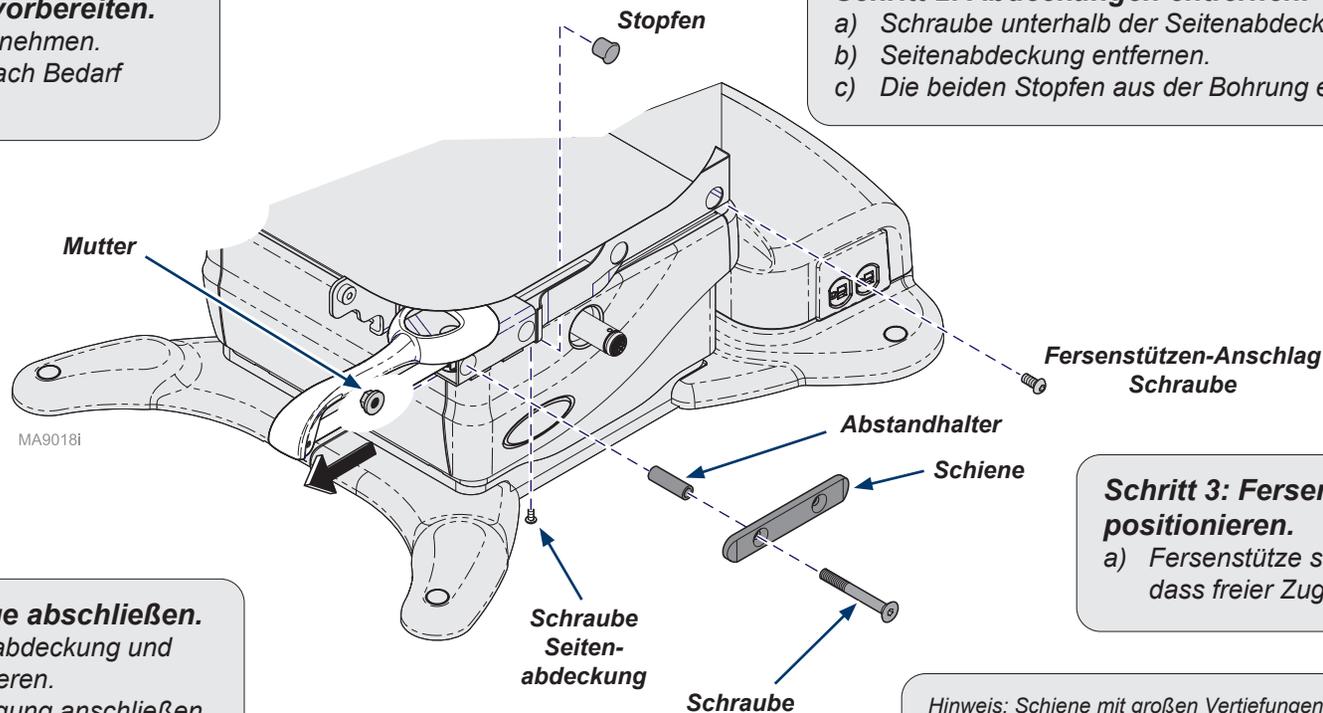

### Schritt 3: Fersenstütze positionieren.

- Fersenstütze so positionieren, dass freier Zugang gewährleistet ist.

### Schritt 6: Montage abschließen.

- Stopfen, Seitenabdeckung und Schraube montieren.
- An Stromversorgung anschließen.
- Winkel an ursprüngliche Position anpassen.
- Polster montieren.
- Betriebsfunktion prüfen.

### Schritt 5: Fersenstütze montieren.

- Fersenstützen-Baugruppe montieren.
- Anschlagschraube der Fersenstütze montieren.

Hinweis: Schiene mit großen Vertiefungen nach außen positionieren, sodass die Schrauben bündig mit der Schiene abschließen.

### Schritt 4: Sitzschiene montieren.

- Sitzschiene und Abstandhalter positionieren.
- Mit zwei Schrauben/Muttern sichern.


# 631-001

## Hinweis

Sitzschienen an beiden Seiten montieren  
(eine Seite abgebildet).

## Schritt 1: Bereich vorbereiten.

- Oberes Polster abnehmen.
- Neigungswinkel nach Bedarf anpassen.

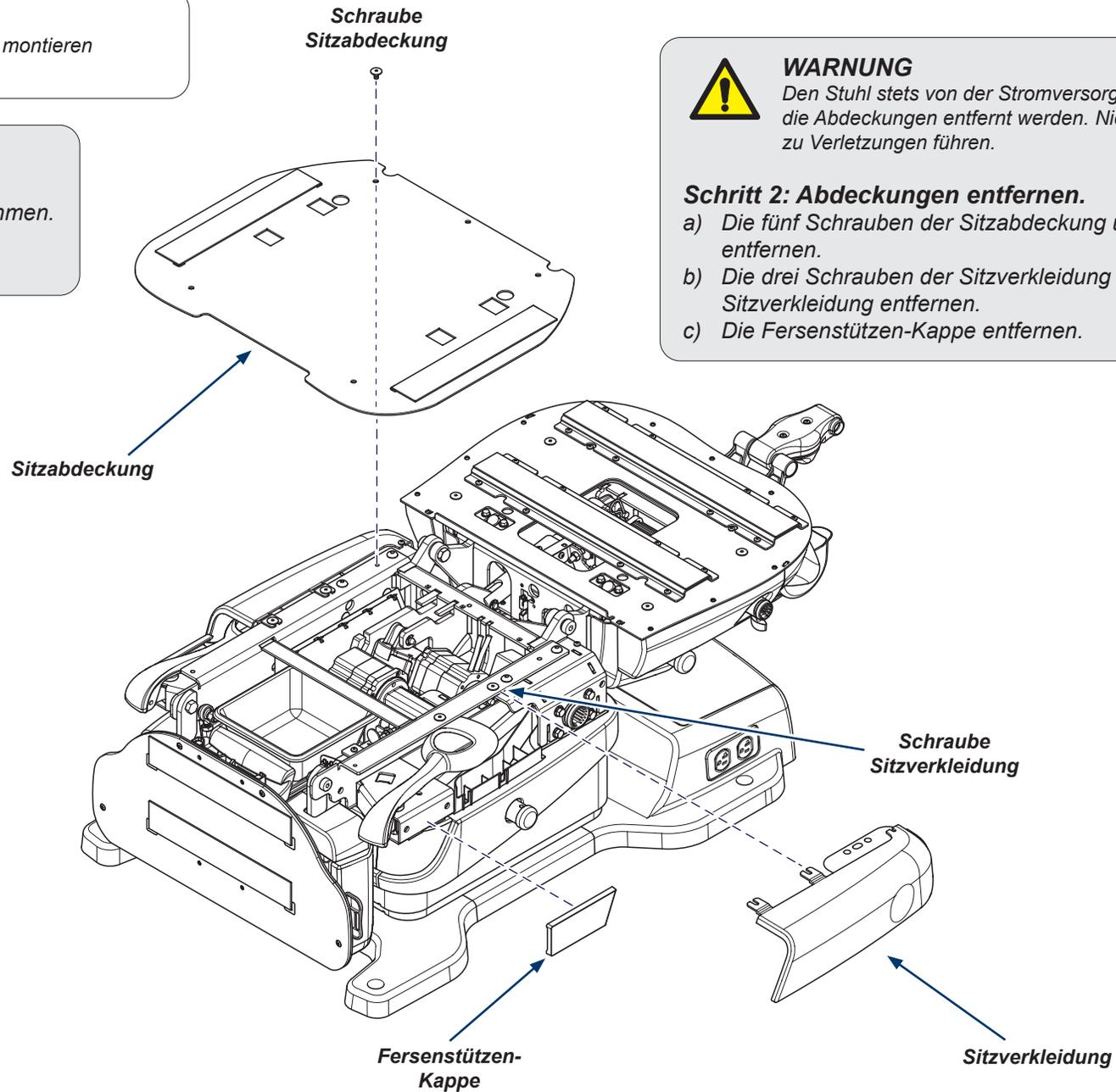

## WARNUNG


Den Stuhl stets von der Stromversorgung trennen, bevor die Abdeckungen entfernt werden. Nichtbefolgung kann zu Verletzungen führen.

## Schritt 2: Abdeckungen entfernen.

- Die fünf Schrauben der Sitzabdeckung und die Sitzabdeckung entfernen.
- Die drei Schrauben der Sitzverkleidung lösen und die Sitzverkleidung entfernen.
- Die Fersenstützen-Kappe entfernen.

## Schritt 3: Fersenstütze positionieren.

- Fersenstütze so positionieren, dass freier Zugang gewährleistet ist.

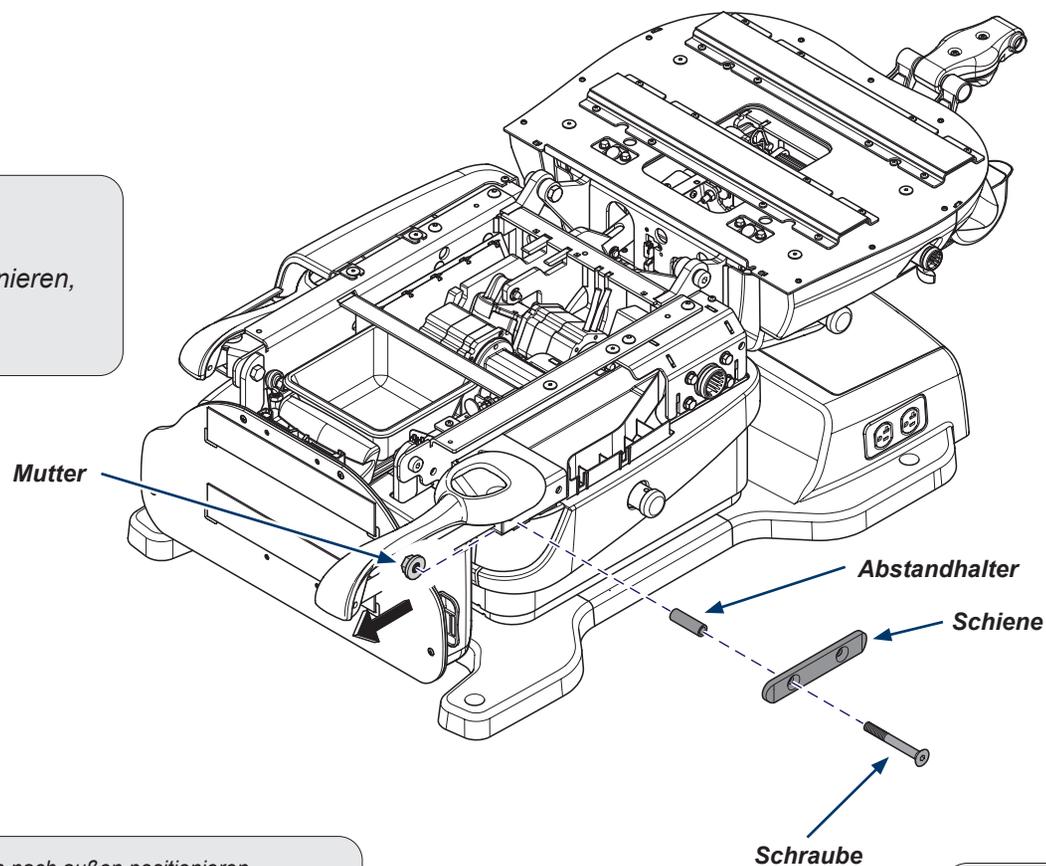

Hinweis: Schiene mit großem Loch nach außen positionieren, sodass die Schrauben bündig zur Schiene abschließen.

## Schritt 4: Sitzschiene montieren.

- Sitzschiene und Abstandhalter positionieren.
- Mit zwei Schrauben/Muttern sichern.

## Schritt 5: Montage abschließen.

- Abdeckungen anbringen.
- An Stromversorgung anschließen.
- Winkel an ursprüngliche Position anpassen.
- Polster montieren.
- Betriebsfunktion prüfen.