

Halterungssysteme mit Keilwelle [9A562 / 9A563 / 9A624 / 9A625]

für die Modelle:

630 (-010 bis -013)
630 (-020 bis -023)
631-001

Ausgangssprache: Englisch

Zweckbestimmung:

Befestigung der Untersuchungslampe 253 am Tisch Midmark® 630 und 631-001.

Hinweis

Der Keilwellenschaft ist formschlüssig befestigt.
Halterung mit Keilwelle drehen, bis sie sich in die Buchse hineinschieben lässt.

Einbau der Halterung mit Keilwelle:

Halterung mit Keilwelle in die Buchse stecken, bis der Freigabehebel einrastet.


Hinweis: Falls an der Buchse ein Verriegelungsknopf oder eine Schutzkappe angebracht ist, ist diese(r) zu entfernen.

Einbau der Lampe und der Kabelrückhaltung:


- Lampe entsprechend den Löchern in der Halterungsplatte ausrichten.
- Lampe befestigen, indem zwei Schrauben in den oberen Löchern angebracht werden.
- Kabelrückhaltung positionieren und anschließend zwei Schrauben in den unteren Löchern anbringen.

Vor dem Einsatz der Lampe:

Schutzfolie von der Linse entfernen.

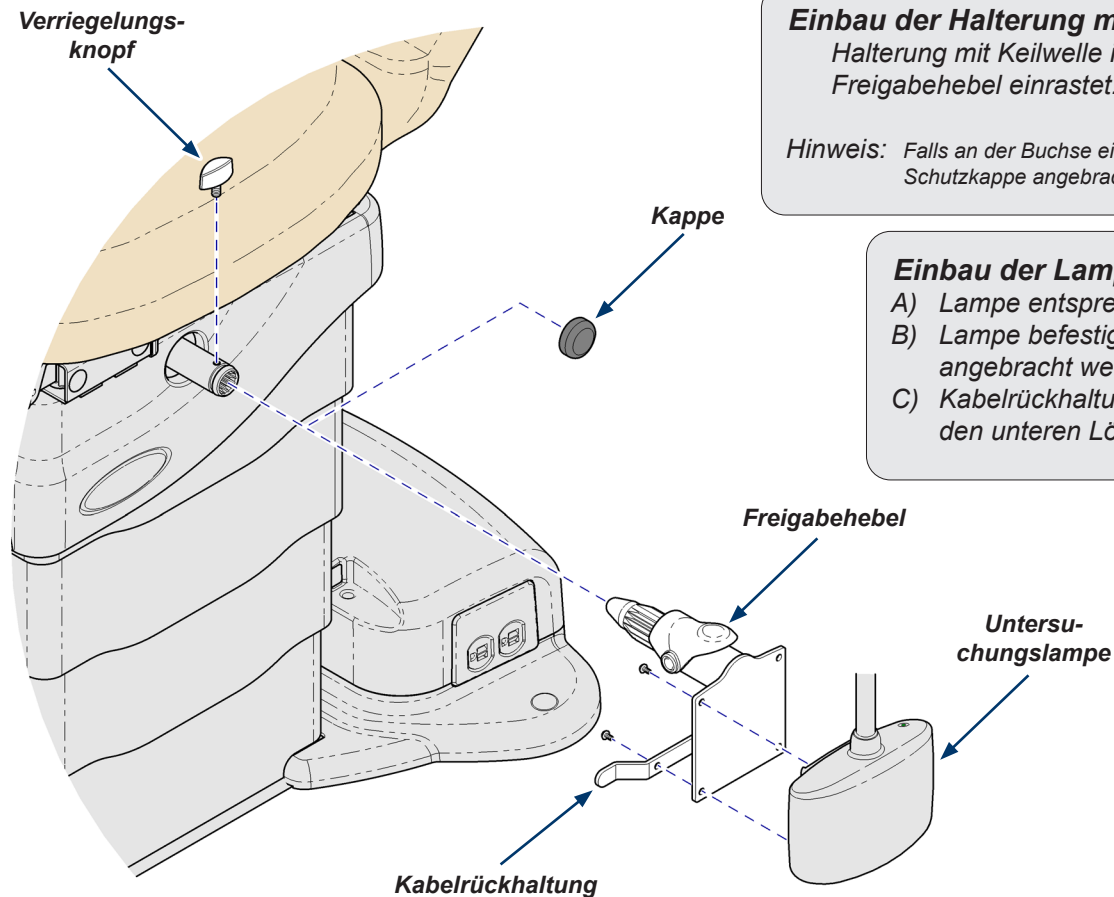

MA9061i

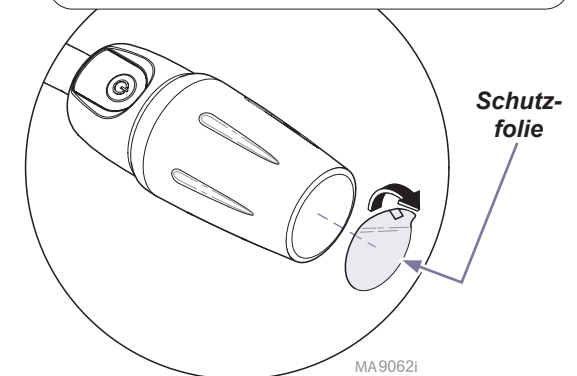

MA9062i