

## Sistemas de soporte con árbol estriado [9A562 / 9A563 / 9A624 / 9A625]

**Se aplica a los  
modelos:**

630 (-010 a -013)  
630 (-020 a -023)  
631-001

Idioma original: Inglés

**Uso previsto:**

Para el montaje de la lámpara de examen 253 en la camilla Midmark® 630 y 631-001.

**Nota**

El árbol estriado incluye una chaveta.

Gire el conjunto del soporte con árbol estriado hasta que se deslice y encaje en el casquillo.

**Para instalar el conjunto del soporte con árbol estriado:**

Empuje el conjunto del soporte con árbol estriado dentro del casquillo hasta que la palanca de apertura encaje en su sitio.



**Nota:** Si el casquillo incluye un tirador de bloqueo o una tapa protectora, retírela.

**Para instalar la lámpara y el dispositivo de retención del cable:**

- Alinee la lámpara con los orificios de la placa de montaje.
- Fije la lámpara colocando dos tornillos a través de los orificios superiores.
- Sitúe el dispositivo de retención del cable en su sitio y luego coloque dos tornillos en la parte inferior.

**Antes de usar la lámpara:**

Retire la película protectora de la lente.

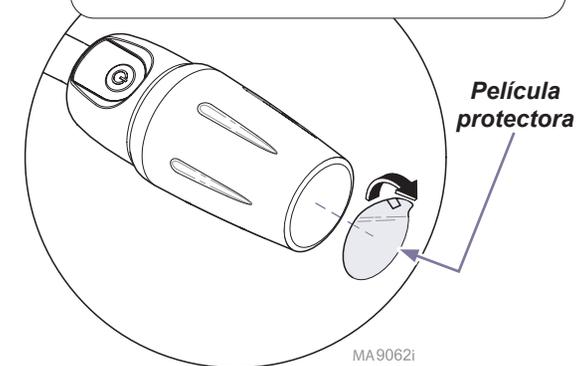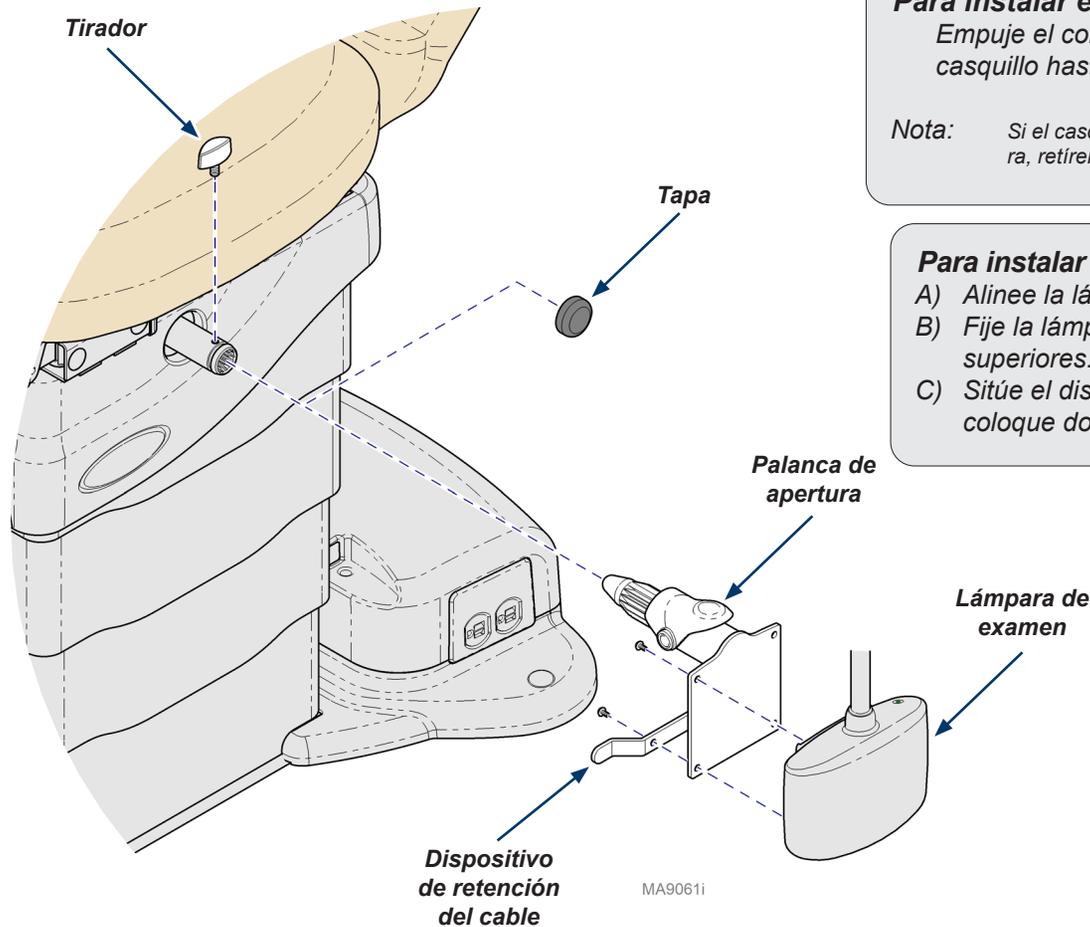

TP200 Rev. A