

Systemes de montage de rail [9A564 / 9A626]

Modèles concernés :

630 (-010 à -013)
630 (-020 à -023)
631-001

Langue d'origine : anglais

Utilisation :

Montage de la lampe d'examen 253 sur la table Midmark® 630 et 631-001.

Restrictions:

Nécessite des rails accessoires
9A557001 (Rembourrage de 71cm)
9A557002 (Rembourrage de 81cm)

Installation du dispositif de montage de rail...

- Faire coulisser l'élément soudé du montage de rail sur le rail, comme indiqué dans l'illustration.
- Installer le bouton de verrouillage et serrer pour bloquer l'élément soudé dans sa position.

Bouton

Installation de la lampe et du guidage de câble...

- Aligner la lampe sur les trous dans la plaque de montage.
- Bloquer la lampe en serrant deux vis dans les trous du haut.
- Positionner correctement le guidage de câble, puis serrer deux vis en bas.




Lampe d'examen

Guidage de câble

Avant d'utiliser la lampe :

Retirer le film protecteur de la lentille.

Film protecteur

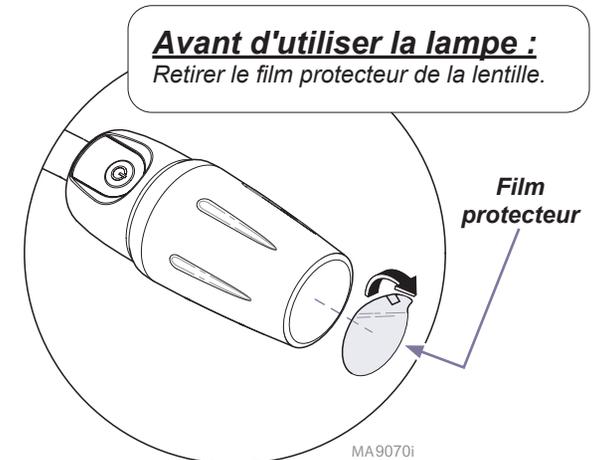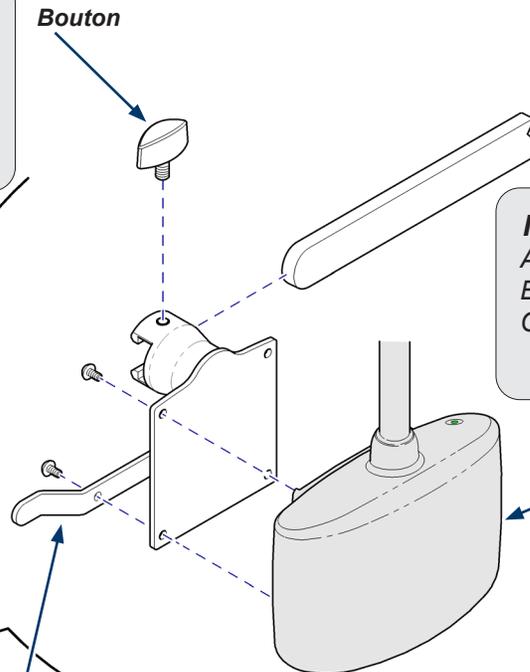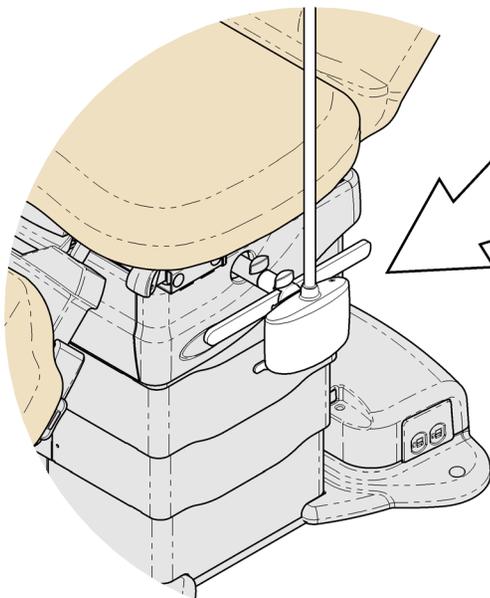

MA9069i

MA9070i