

Sistema de soporte con riel [9A564 / 9A626]

Se aplica a los modelos:

630 (-010 a -013)
630 (-020 a -023)
631-001

Idioma original: Inglés

Uso previsto:

Para el montaje de la lámpara de examen 253 en la camilla Midmark® 630 y 631-001.

Restricciones:

Requiere Rieles Accesorios
9A557001 (Tapicería de 71cm)
9A557002 (Tapicería de 81cm)

Para instalar el conjunto del soporte con riel:

- Deslice la pieza soldada del soporte con riel hacia el riel, como se indica.
- Instale el tirador de bloqueo y ajústelo para fijar la pieza soldada en su sitio.

Tirador

Para instalar la lámpara y el dispositivo de retención del cable:

- Alinee la lámpara con los orificios de la placa de montaje.
- Fije la lámpara colocando dos tornillos a través de los orificios superiores.
- Sitúe el dispositivo de retención del cable en su sitio y luego coloque dos tornillos en la parte inferior.


Lámpara de examen

Dispositivo de retención del cable

Antes de usar la lámpara:

Retire la película protectora de la lente.

Película protectora

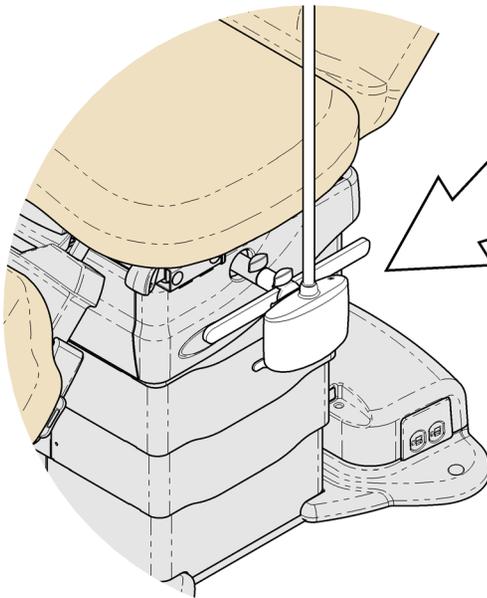

MA9069i



MA9070i