

Sitzschiene (81,3 cm, 32 in) [9A568]

Gültig für die Modelle:

630 (-010 bis -013)

630 (-020 bis -023)

631-001

Herkunftssprache: Deutsch

Hinweis

Sitzschienen an beiden Seiten montieren (eine Seite abgebildet).

630-Modelle

Schritt 1: Bereich vorbereiten.

- Oberes Polster abnehmen.
- Neigungswinkel nach Bedarf anpassen.



WARNUNG

Den Stuhl stets von der Stromversorgung trennen, bevor die Abdeckungen entfernt werden. Nichtbefolgung kann zu Verletzungen führen.

Schritt 2: Abdeckungen entfernen.

- Schraube unterhalb der Seitenabdeckung entfernen.
- Seitenabdeckung entfernen.
- Die beiden Stopfen aus der Bohrung entfernen.

Schritt 3: Fersenstütze vom Stuhl entfernen.

- Anschlagschraube der Fersenstütze entfernen.
- Fersenstützen-Baugruppe entfernen.

Hinweis: Unlackierte Blockseite Richtung Stuhl positionieren. Für Informationen zum ordnungsgemäßen Drehmoment siehe Spezifikationen.

Schritt 4: Block montieren.

- Halterung und Drehbolzen entfernen.
- Block positionieren.
- Mit zwei kurzen Schrauben sichern.

Hinweis: Für Informationen zum ordnungsgemäßen Drehmoment siehe Spezifikationen. Schiene mit großem Loch nach außen positionieren, sodass die langen Schrauben bündig zur Schiene abschließen.

Schritt 5: Sitzschiene montieren.


- Sitzschiene, Abstandhalter und Block positionieren.
- Mit zwei langen Schrauben sichern.

Schritt 6: Fersenstütze montieren.

- Halterung und Drehbolzen montieren.
- Fersenstützen-Baugruppe montieren.
- Anschlagschraube der Fersenstütze montieren.

Schritt 7: Montage abschließen.

- Stopfen, Seitenabdeckung und Schraube montieren.
- An Stromversorgung anschließen.
- Winkel an ursprüngliche Position anpassen.
- Polster montieren.
- Betriebsfunktion prüfen.

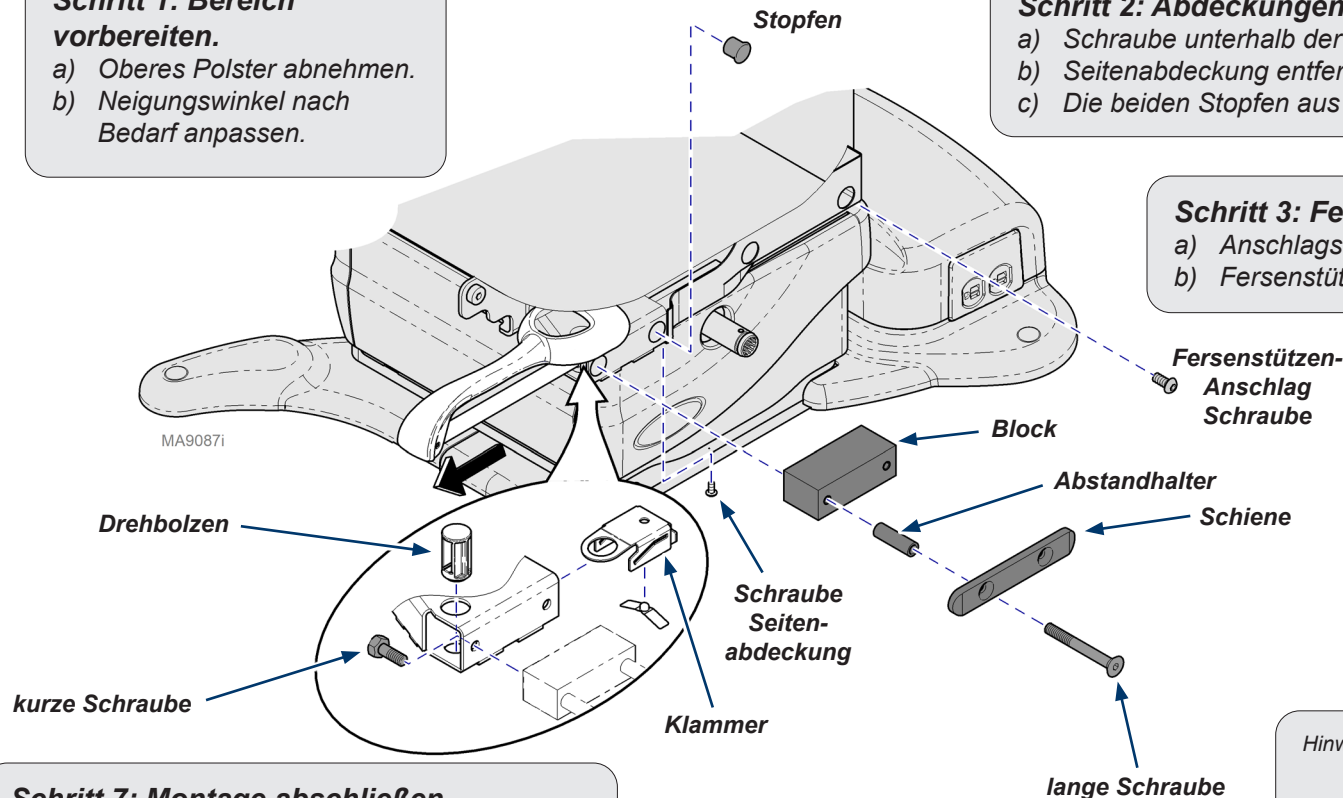

MA90871

Hinweis

Sitzschienen an beiden Seiten montieren
(eine Seite abgebildet).

Schritt 1: Bereich vorbereiten.

- Oberes Polster abnehmen.
- Neigungswinkel nach Bedarf anpassen.

Schraube
Sitzabdeckung

Sitzabdeckung



WARNUNG

Den Stuhl stets von der Stromversorgung trennen, bevor die Abdeckungen entfernt werden. Nichtbefolgung kann zu Verletzungen führen.

Schritt 2: Abdeckungen entfernen.

- Die fünf Schrauben der Sitzabdeckung und die Sitzabdeckung entfernen.
- Die drei Schrauben der Sitzverkleidung lösen und die Sitzverkleidung entfernen.
- Die Fersenstützen-Kappe entfernen.

Schraube
Sitzverkleidung

Fersenstützen-
Kappe

Sitzverkleidung


631-001 – Fortsetzung

Hinweis

Die Fersenstütze muss teilweise herausgezogen werden, um an die Anschlagsschraube zu gelangen.

Schritt 3: Fersenstütze vom Stuhl entfernen.

- Anschlagsschraube der Fersenstütze entfernen.
- Fersenstützen-Baugruppe entfernen.

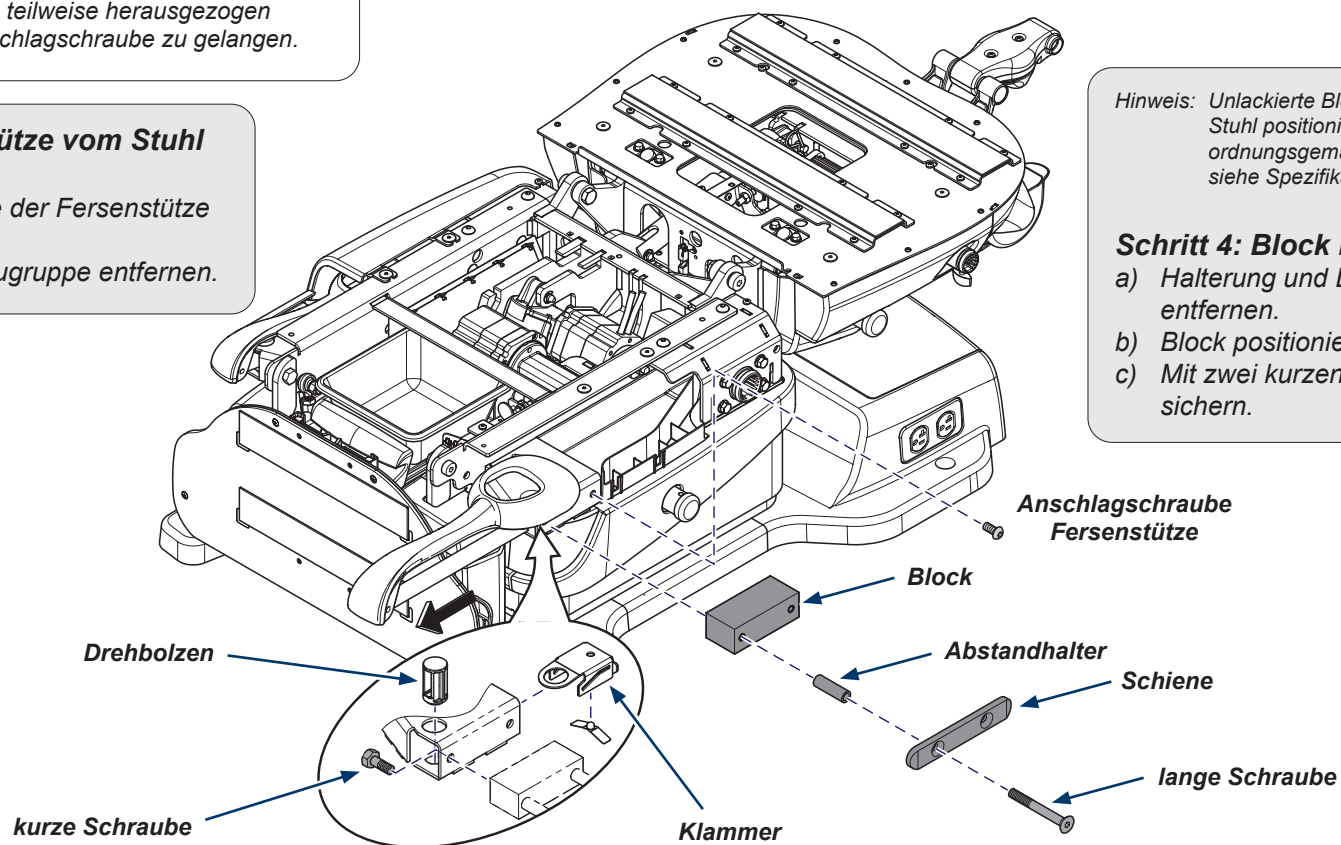

Hinweis: Unlackierte Blockseite Richtung Stuhl positionieren. Zum ordnungsgemäßen Drehmoment siehe Spezifikationen.

Schritt 4: Block montieren.

- Halterung und Drehbolzen entfernen.
- Block positionieren.
- Mit zwei kurzen Schrauben sichern.

Hinweis: Für Informationen zum ordnungsgemäßen Drehmoment siehe Spezifikationen. Schiene mit großem Loch nach außen positionieren, sodass die langen Schrauben bündig zur Schiene abschließen.

Schritt 5: Sitzschiene montieren.

- Sitzschiene, Abstandhalter und Block positionieren.
- Mit zwei langen Schrauben sichern.

Schritt 6: Fersenstütze montieren.

- Halterung und Drehbolzen montieren.
- Fersenstützen-Baugruppe montieren.
- Anschlagsschraube der Fersenstütze montieren.

Schritt 7: Montage abschließen.

- Abdeckungen anbringen.
- An Stromversorgung anschließen.
- Winkel an ursprüngliche Position anpassen.
- Polster montieren.
- Betriebsfunktion prüfen.