

Riel del asiento (81 cm [32"])[9A568]

Se aplica a los modelos:
630 (de -010 a -013)
630 (de -020 a -023)
631-001

Idioma original: inglés

Nota

Instale los rieles del asiento en ambos lados (la ilustración muestra uno solo).

Modelos 630

Paso 1: Prepare el área.

- A) Retire la tapicería de la parte superior.
- B) Ajuste el ángulo de inclinación según sea necesario.



ADVERTENCIA

Desconecte siempre el sillón de la fuente de alimentación antes de retirar cualquiera de las cubiertas. Si no lo hace, puede sufrir lesiones personales.

Paso 2: Retire las cubiertas.

- A) Retire el tornillo de la parte inferior de la cubierta lateral.
- B) Retire la cubierta lateral.
- C) Retire los dos tapones de los orificios.

Paso 3: Retire el estribo del sillón.

- A) Retire el tornillo de tope del estribo.
- B) Retire el conjunto del estribo.

Tornillo de tope del estribo

Nota: El lateral del bloque sin pintar se acopla al sillón. Consulte la hoja de especificaciones para obtener el par de torsión correcto.


Paso 4: Instale el bloque.

- A) Retire el soporte y el perno de la articulación.
- B) Coloque el bloque.
- C) Asegúrelo con dos tornillos cortos.

Nota: Consulte la hoja de especificaciones para obtener el par de torsión correcto. Coloque el riel con el orificio grande en el lado externo de modo que los tornillos largos queden al ras del riel.

Paso 5: Instale el riel del asiento.

- A) Coloque el riel del asiento, los separadores y el bloque.
- B) Asegúrelo con dos tornillos largos.

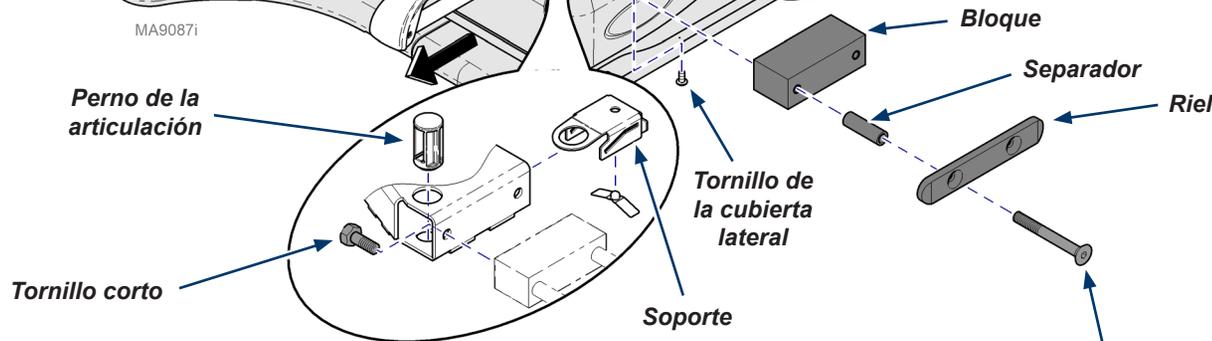

Paso 7: Finalice la instalación.

- A) Instale los tapones, la cubierta lateral y el tornillo.
- B) Conecte la alimentación.
- C) Ajuste la inclinación a la posición original.
- D) Instale la tapicería.
- E) Compruebe el funcionamiento.

Paso 6: Instale el estribo.

- A) Instale el soporte y el perno de la articulación.
- B) Instale el conjunto del estribo.
- C) Instale el tornillo de tope del estribo.

MA90871


631-001

Nota

Instale los rieles del asiento en ambos lados (la ilustración muestra uno solo).

Paso 1: Prepare el área.

- A) Retire la tapicería de la parte superior.
- B) Ajuste el ángulo de inclinación según sea necesario.

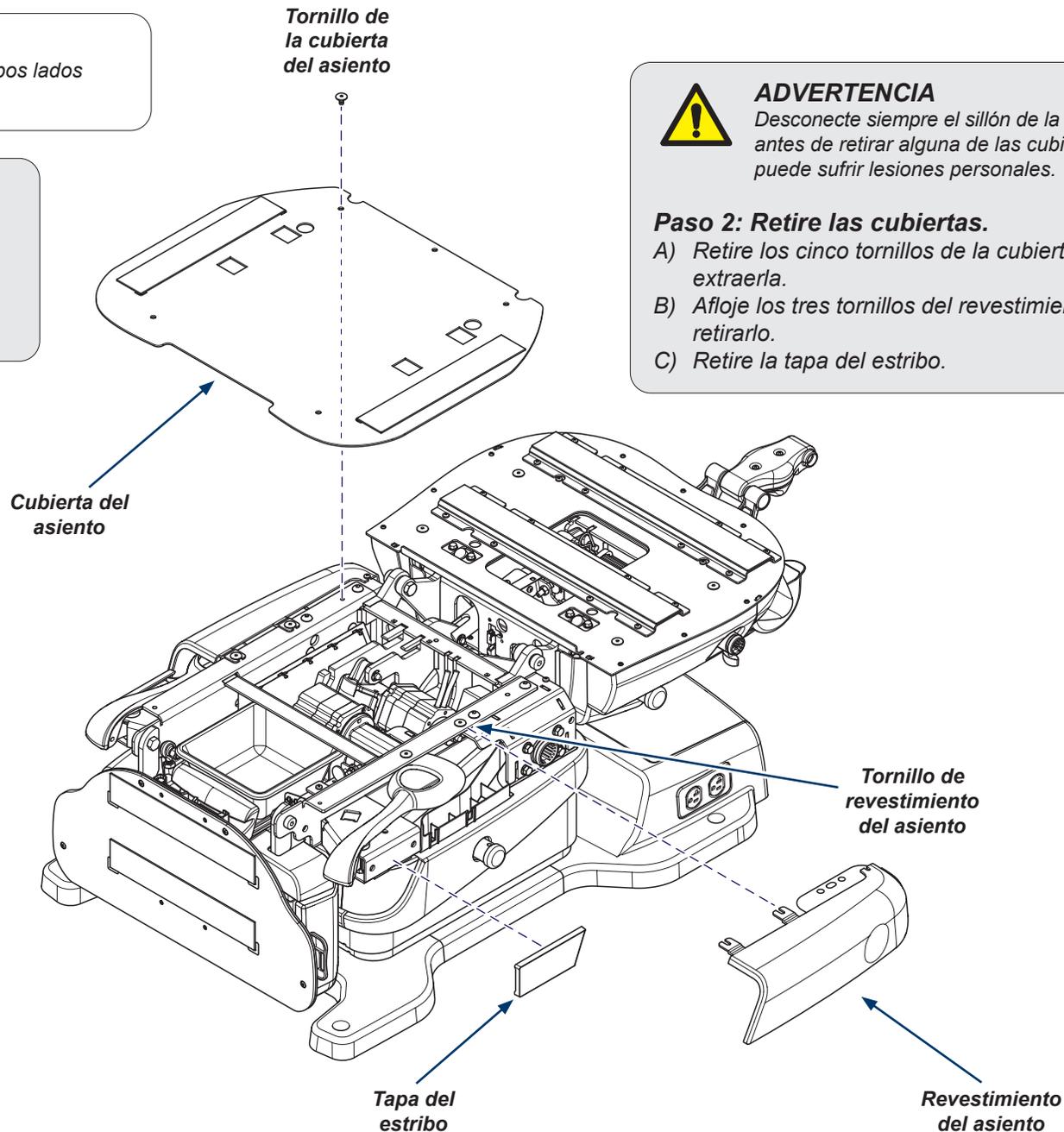

ADVERTENCIA

Desconecte siempre el sillón de la fuente de alimentación antes de retirar alguna de las cubiertas. Si no lo hace, puede sufrir lesiones personales.

Paso 2: Retire las cubiertas.

- A) Retire los cinco tornillos de la cubierta del asiento para extraerla.
- B) Afloje los tres tornillos del revestimiento del asiento para retirarlo.
- C) Retire la tapa del estribo.


631-001 (continuación)

Nota

El estribo debe extenderse parcialmente para acceder al tornillo de tope.

Paso 3: Retire el estribo del sillón.

- A) Retire el tornillo de tope del estribo.
- B) Retire el conjunto del estribo.

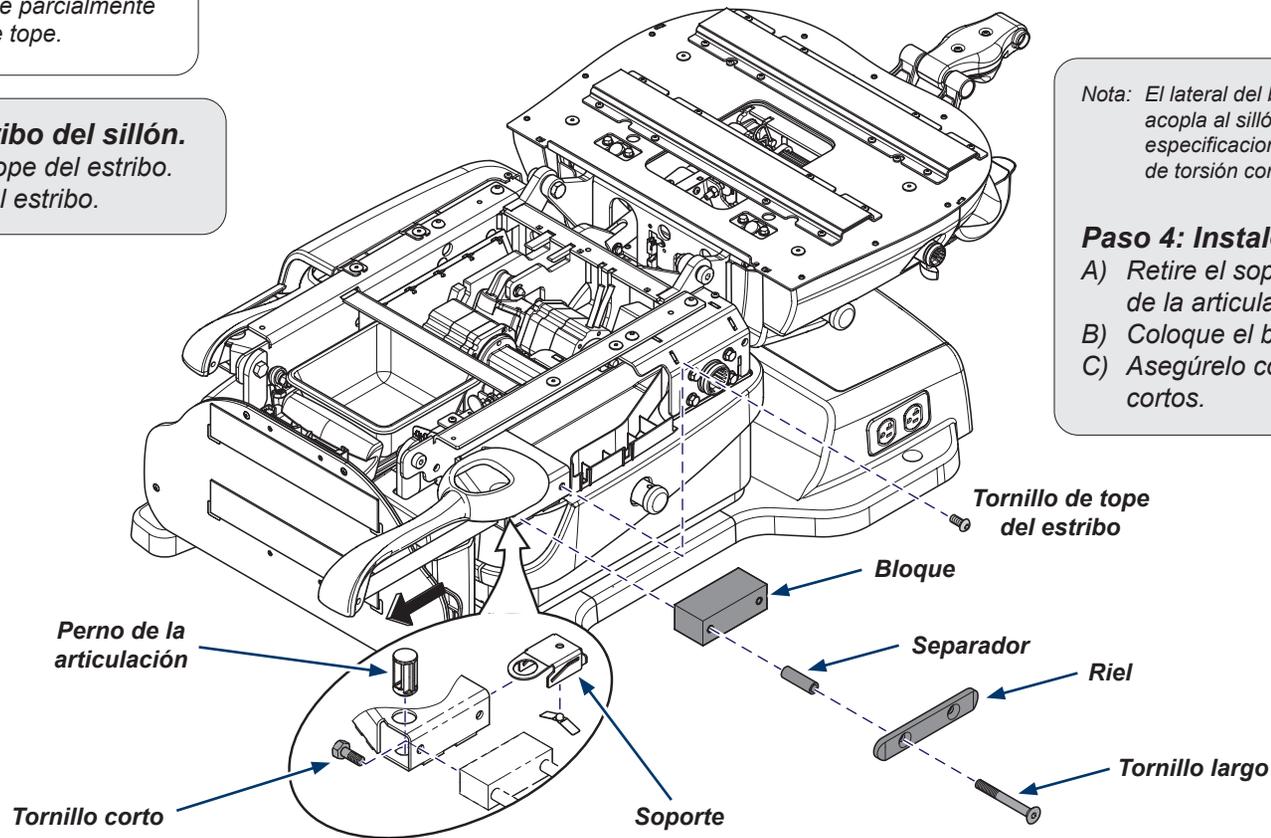

Nota: El lateral del bloque sin pintar se acopla al sillón. Consulte la hoja de especificaciones para obtener el par de torsión correcto.

Paso 4: Instale el bloque.

- A) Retire el soporte y el perno de la articulación.
- B) Coloque el bloque.
- C) Asegúrelo con dos tornillos cortos.

Nota: Consulte la hoja de especificaciones para obtener el par de torsión correcto. Coloque el riel con el orificio grande en el lado externo de modo que los tornillos largos queden al ras del riel.

Paso 5: Instale el riel del asiento.

- A) Coloque el riel del asiento, los separadores y el bloque.
- B) Asegúrelo con dos tornillos largos.

Paso 6: Instale el estribo.

- A) Instale el soporte y el perno de la articulación.
- B) Instale el conjunto del estribo.
- C) Instale el tornillo de tope del estribo.

Paso 7: Finalice la instalación.

- A) Instale las cubiertas.
- B) Conecte la alimentación.
- C) Ajuste la inclinación a la posición original.
- D) Instale la tapicería.
- E) Compruebe el funcionamiento.