

Gelenkarmlehne am Stuhl [9A550]

Für die Modelle:

630 (-010 bis -013)
630 (-020 bis -023)
631-001

Ausgangssprache: Englisch

Zweckbestimmung:

zum Stützen der Arme der Patienten während Behandlungen.

Einschränkungen:

Stuhlarmlehnen nicht über zulässigem Höchstgewicht belasten. Zulässiges Höchstgewicht (pro Armlehne): 102 kg (225 lb)

Hinweis: Der Keilwellenschaft ist formschlüssig befestigt. Stuhlarmlehne drehen, bis sie sich in die Buchse hineinschieben lässt.


Montage von Stuhlarmlehnen:

- Kappe von Buchse entfernen.
- Stuhlarmlehne wie abgebildet positionieren.
- Armlehne in Buchse einführen, bis sie einrastet.



Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass Arme und Hände der Patienten beim Absenken des Rückenteils ordnungsgemäß auf den Armlehnen des Stuhls liegen. Die Nichtbefolgung kann die Verletzung von Personen zur Folge haben.

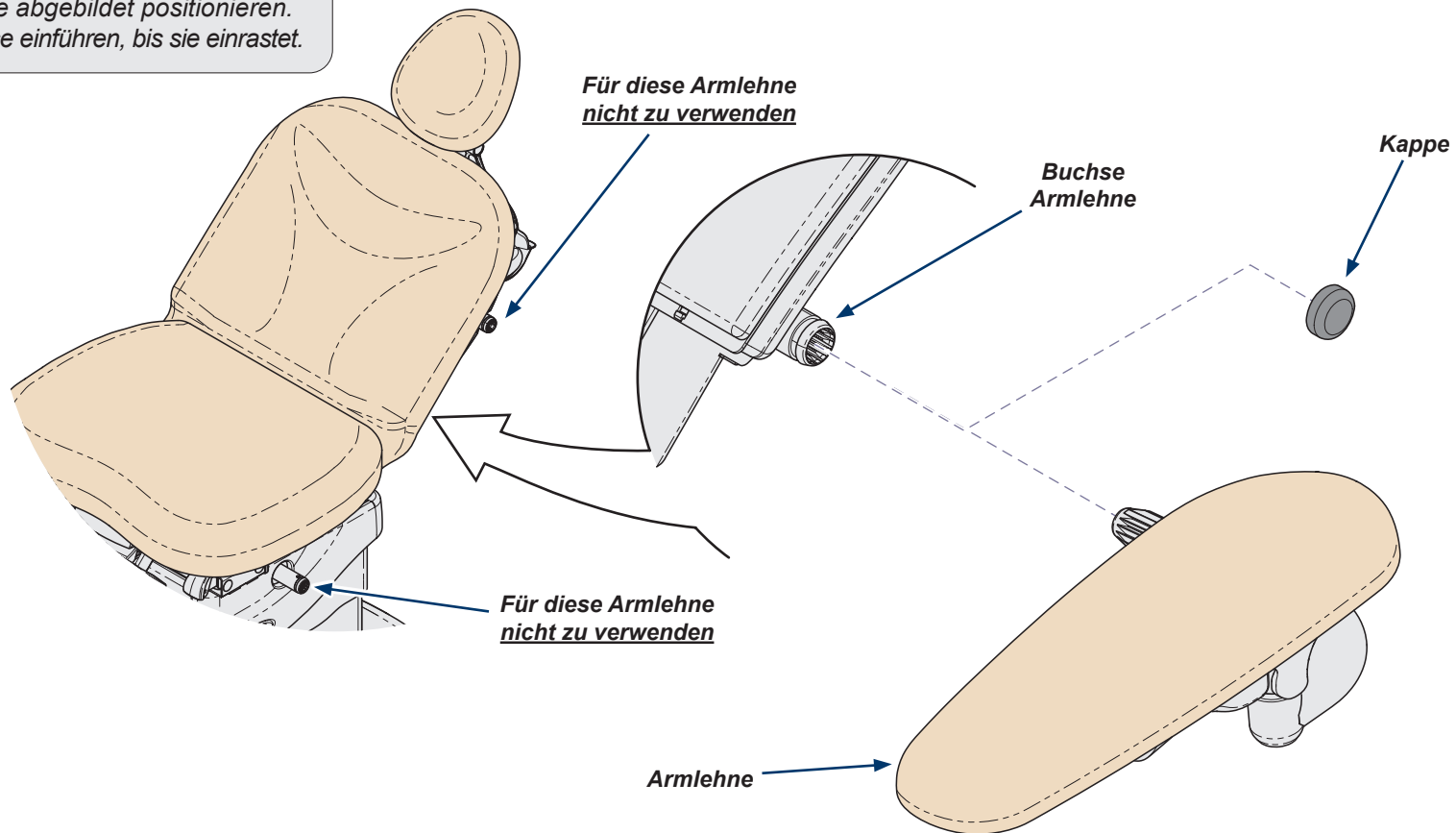

MA9027i