

Brazo articulado del sillón [9A550]

Se aplica a los

modelos:

630 (-010 a -013)

630 (-020 a -023)

631-001

Idioma original: Inglés

Uso indicado:

Servir de apoyo a los brazos del paciente durante los procedimientos.

Restricciones:

No sobrepase la capacidad máxima de peso de los brazos del sillón. Capacidad máxima de peso (cada brazo): 102 kg (225 lb)

Nota: El eje ranurado incluye una claveta. Gire el brazo del sillón hasta que entre deslizándose en el receptáculo.


Para instalar los brazos del sillón...

- Retire la tapa del receptáculo del brazo.
- Coloque el brazo como se indica en la figura.
- Introduzca el brazo en el receptáculo hasta que se bloquee en su sitio.



Precaución

Asegúrese de que los brazos y las manos del paciente están colocados correctamente parte superior de los brazos del asiento durante la reclinación de la sección del respaldo. Si no lo hace puede provocar lesiones personales.

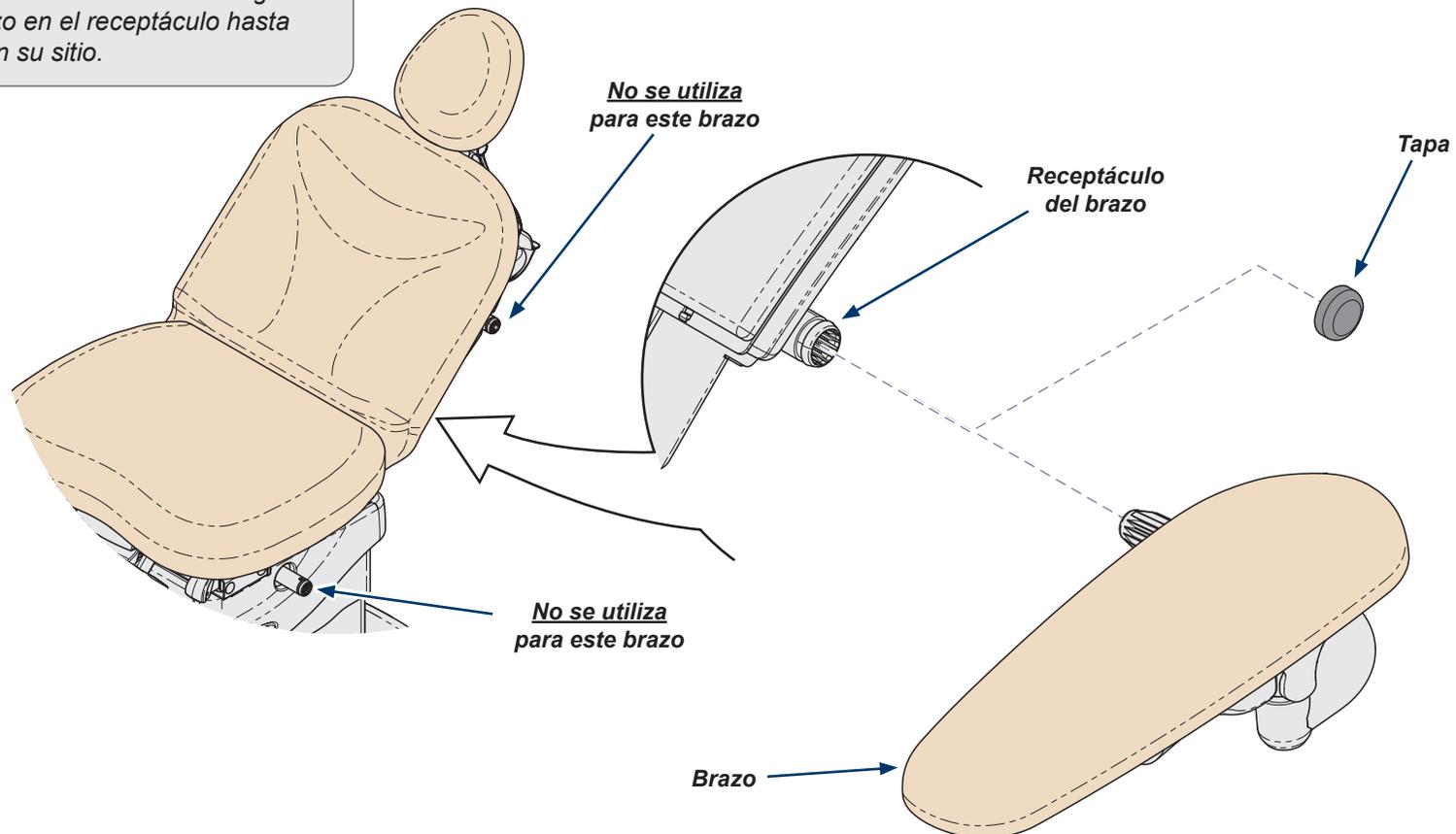

MA90271