


L'écran Accueil apparaît lorsque l'interrupteur principal est mis sur MARCHÉ ; les icônes apparaissent lorsque le logiciel communique avec chacun d'entre eux.

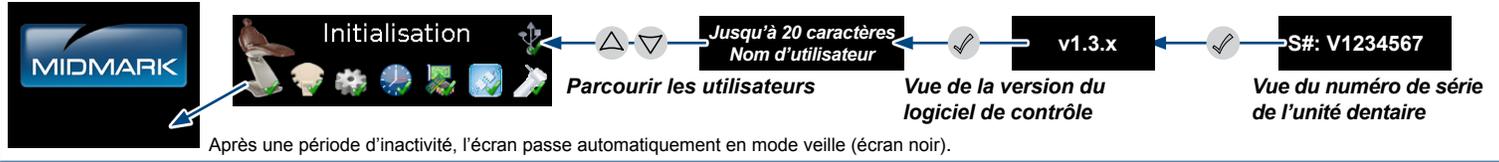

**Icônes de composant**

- Fauteuil
- Unité de l'assistant
- Moteur électrique
- Configuration
- Horloge
- Carte d'interface (version logicielle)
- E/S étendue
- USB

**Icônes d'état**  Prêt Il y a un problème Pas de communication Option non connectée

Les composants ne fonctionnent que lorsqu'ils sont accompagnés d'une .

## Configuration / Sélection Prédéf. / Préréglages Dénomination

pour l'accès. (Chaque utilisateur a une Configuration.)

Sélectionnez Enregistrement automatique ACTIVE ( = ACTIVE (par défaut) ) Chaque paramètre de contrôle modifié est enregistré automatiquement dans Utilisateur/Préréglage indiqué. DESACTIVE ( = DESACTIVE ) Modifiez les paramètres de façon répétée sans les enregistrer ou appuyez sur l'invitation Sauver pour les enregistrer dans Utilisateur/Préréglage.

**Conseil :** Regardez les aides pour connaître les boutons actifs pour chaque écran.

- met la Sélection Prédéf. désirée en surbrillance et vous amène à l'écran Sélection Prédéf.
- met la pièce à main désirée en surbrillance et vous amène à l'écran Dénomination Prédéf.

Appuyez sur et pour accéder à la case de commutation souhaitée et appuyez sur pour y insérer un X.

Appuyez sur pour déplacer le curseur dans la Zone de texte, puis appuyez sur pour faire défiler les lettres/caractères jusqu'à celle/celui désiré(e).


Appuyez sur pour aller à l'espace suivant, puis appuyez sur pour faire défiler les lettres/caractères jusqu'à celle/celui désiré(e).

Répétez l'opération jusqu'à ce que l'intégralité du Nom préréglage soit dans la Zone de texte.

Appuyez sur pour revenir à la Case de commutation, PUIS appuyez plusieurs fois sur pour faire dérouler tous les Noms préréglage dans l'écran Sauver / Annuler.

**Remarque :** Entrez les noms d'utilisateur en utilisant une méthode similaire à celle utilisée dans le Menu Configuration / Sélection Utilisateur accessible en appuyant sur + .

## Programmer les positions du fauteuil

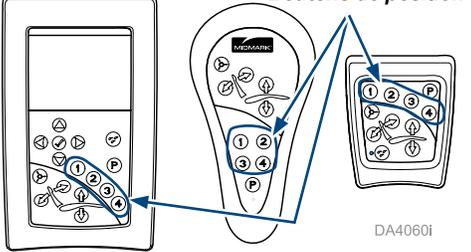

Utilisez les boutons et sur tout dispositif de commande pour placer la chaise dans la position souhaitée.

Appuyez sur un bouton de position ( 1 2 3 ou 4 ) et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Attendez que le fauteuil émette trois bips. (Indique que la position courante est programmée sur le bouton.)

Utilisez les boutons et pour mettre le fauteuil dans une autre position.

Appuyez sur le bouton de position que vous venez de programmer et vérifiez que la chaise se remet dans la position correspondante.

**Remarque :** Chaque utilisateur peut programmer ses propres positions de fauteuil. Notez toujours l'utilisateur actif à l'écran avant d'utiliser une position programmée.

## Écrans des Opérations de vidange

Le menu s'affiche lorsque deux pièces à main intelligentes ou plus sont retirées.

met une option en surbrillance et la sélectionne.

L'écran Sélection du rinçage apparaît.

Appuyez sur pour mettre une option en surbrillance et sur pour modifier le temps de rinçage.

Appuyez sur pour sélectionner/initier l'option.

L'écran Processus de rinçage s'affiche et indique la progression du rinçage.

L'écran Rinçage terminé s'affiche lorsque le rinçage est terminé.

**Remarque :** Le rinçage de la seringue est manuel. Maintenez le bouton d'eau enfoncé pendant toute la durée du processus de rinçage.

Appuyez sur (SÉLECTIONNER) pour revenir à l'écran Sélection du rinçage.

Utilisez Quitter en surbrillance et appuyez sur pour sélectionner.


Le menu Opérations de vidange s'affiche.

Utilisez Quitter en surbrillance et appuyez sur pour sélectionner et revenir à l'écran d'accueil.

**Remarque :** Toutes les pièces à main doivent être remises sur leurs supports pour quitter l'opération de rinçage.

## Utilisation des écrans de contrôle Pièce à main intelligente :

### Turbine à air en mode Normal

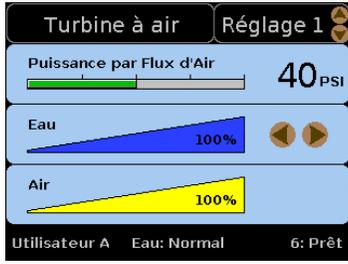

S'affiche lorsqu'une pièce à main Turbine à air est retirée de son support. Commandes actives : Norm pré-réglage et Réglage de l'eau.

En mode Normal :

Appuyez sur pour modifier le pré-réglage actif, si vous le désirez.

Appuyez sur pour changer le paramètre actif.

Appuyez sur pour basculer entre les modes Normal et Modifier.

En mode Modifier :  
(écran non illustré)

Des aides et une surbrillance apparaissent sur les contrôles actifs.

Appuyez sur pour activer un paramètre différent.


Appuyez sur pour changer le paramètre actif (mis en surbrillance).

- Lorsque Enregistrement automatique est ACTIVE, les changements réalisés à l'écran sont automatiquement sauvegardés pour le Pré-réglage affiché. Voir Configuration Utilisateur pour connaître la méthode d'Activation/Désactivation de l'Enregistrement automatique.
- Appuyez sur la pédale pour actionner une pièce à main retirée de son support.

Observez le statut de l'eau sur les écrans. Utilisez pour faire basculer l'eau entre Normal (contrôlé par le sélecteur sur la pédale) et Marche.

### Paramètres de contrôle des enregistrements lorsque l'Enregistrement automatique est désactivé...

- Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée (2 sec.) jusqu'à ce que la valeur prédéfinie # et l'invitation Sauver ? clignotent en alternance.
- Un message clignote dans le bas de l'écran pour indiquer Réglages enregistrés, puis revient à la normale.
- Si vous ne sauvegardez pas les paramètres modifiés, l'invitation Sauver ? continue de clignoter.

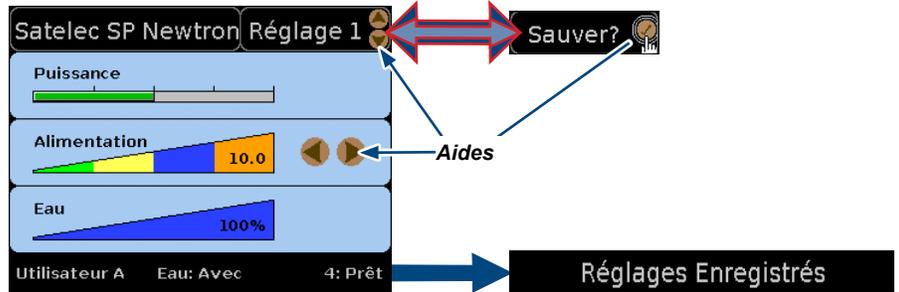

#### Remarque :

L'option par défaut est réglée sur Enregistrement automatique, autrement dit, dès que vous changez un paramètre, il est automatiquement enregistré comme le pré-réglage actif pour l'utilisateur actif.

Le menu Configuration permet d'ACTIVER l'option DESACTIVER.

### Écran de contrôle du moteur électrique Bien Air - Mode MODIFIER

S'affiche lorsqu'une pièce à main Bien Air est retirée de son support et que la case est cochée.

#### Nom de la pièce à main

**Vitesse** - la valeur indiquée est le régime maximum à l'arrêt et le régime courant lorsque la pédale est pressée  
Barre bleue - indique la vitesse  
Barre verte - indique le couple

#### Couple

% du maximum Valeur du couple  
Options Arrêt automatique / Marche avant automatique / Marche arrière automatique  
Horloge Marche automatique - s'affiche uniquement pour la marche avant automatique

#### Eau

montre le % du débit Le remplissage bleu indique le débit réel **Remarque : L'eau est en position d'ARRÊT forcé en environnement Endo.**



**Nom pré-réglage** - jusqu'à 10 pré-réglages par utilisateur

**Oper / Endo** - basculement de l'environnement

**Rapport du contre-angle** - la couleur et le rapport doivent toujours correspondre au rapport et à la couleur gravés sur le contre-angle utilisé.

Augmentation Direct Diminution

**Direction rotationnelle du moteur** -

Marche avant (bleue) Marche arrière (rouge)

**Éclairage** - basculement

Éclairage ARRETE Éclairage en MARCHE

### Moteur électrique Bien Air - Ecran Choix de la vitesse

s'affiche lorsqu'en mode Modifier 1:1 est actif et que + sont appuyés.

#### Affichage et sélection des rapports à afficher

Les rapports accompagnés d'un X sont ceux disponibles dans les options des rapports du contre-angle affichées en mode Modifier.


#### Ajouter un rapport personnalisé



Aides

Suivante Masquer

### Écran Erreur

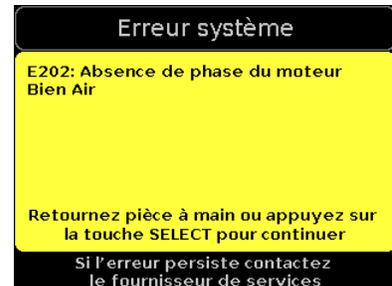

S'affiche lorsqu'une erreur est détectée. Suivez les instructions affichées. Si l'erreur est spécifique à une pièce à main, le fonctionnement des autres pièces à main ne devrait pas être affecté.

Versions du logiciel  
v1.3.x et 2.0.x