


Se muestra la pantalla de Inicio cuando el interruptor principal está encendido; los iconos aparecen mientras los distintos software se comunican entre sí.

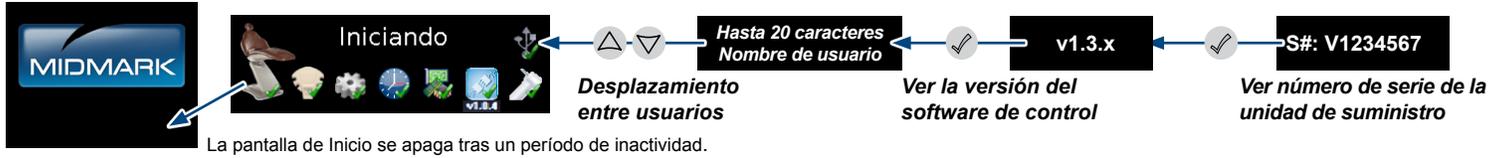


Iconos de componentes



Iconos de estado Listo Hay un problema No hay comunicación Opción no conectada Los componentes solo funcionan cuando tienen una .

Configuración / Selección prog / Introducción prog para acceder. (Cada usuario cuenta con una configuración.)

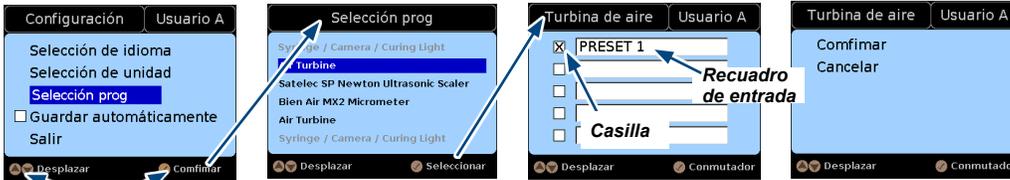


Activar Guardar automáticamente = ACTIVADO (por defecto) Todos los ajustes de control modificados se guardan automáticamente en el Usuario/Programa indicado. DESACTIVAR (= DESACTIVADO) Alterar los ajustes repetidamente sin guardarlos, o pulsar el indicado de Guardar para guardar en ese Usuario/Programa.

Recomendación: Observar los indicadores para saber qué botones están activos en cada pantalla.

- desplaza la selección a la Selección prog deseada y y conduce a la pantalla de Selección prog.
- desplaza la selección a la pieza de mano deseada y y conduce a la pantalla de Introducción prog.
- Pulsar y para desplazarse hasta la casilla deseada y pulsar para marcarla con una X.
- Pulsar para introducir el cursor en el recuadro de entrada, a continuación pulsar para desplazarse por las letras/caracteres hasta llegar a la posición deseada.
- Pulsar para desplazarse al espacio siguiente y pulsar para desplazarse por las letras/caracteres hasta llegar a la posición deseada.
- Repetir hasta que el nombre del programa esté en el recuadro de entrada.
- Pulsar para volver a la casilla, A CONTINUACIÓN pulsar repetidamente para desplazarse por todos los nombres de programa hasta la pantalla de Guardar/Cancelar.

Nota: Introducir los Nombres de usuario utilizando un método similar desde el Menú de configuración/Selección de usuario, accediendo pulsando + .

Programación de las posiciones del sillón

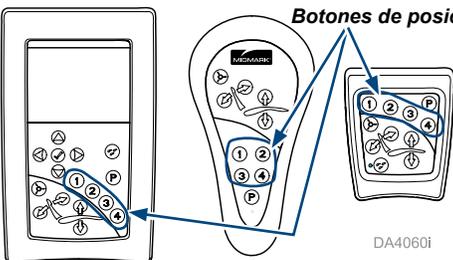

Use los botones y en cualquier dispositivo de control para mover el sillón a la posición deseada.

Pulse sin soltar un botón de posición (1 2 3 o 4) durante dos segundos.


Espera a que el sillón emita tres pitidos. (Indica que la posición actual se ha programado en el botón.)

Use los botones y para mover el sillón a una posición diferente.

Pulse el botón de posición que acaba de programar y compruebe que el sillón se mueve a esa posición.

Nota: Cada usuario puede programar su propio conjunto de posiciones programadas del sillón. Observe siempre cuál es el usuario activo en la pantalla antes de pulsar el botón de una posición programada.

El Menú de operaciones de enjuague aparece cuando se tira de dos o más piezas de mano inteligentes.

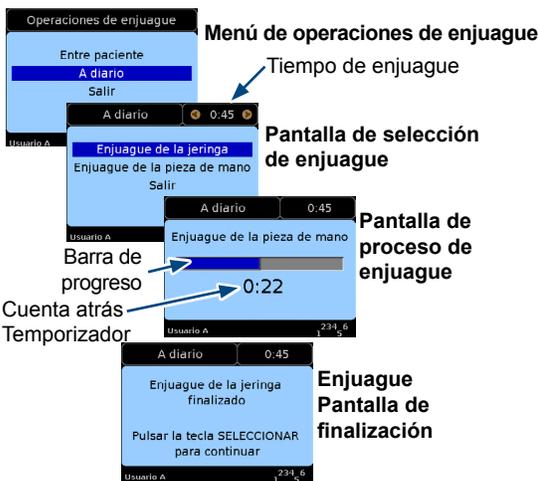

desplaza la selección hasta una opción y la confirma.

Aparece la pantalla de selección de enjuague.

Pulse para destacar una opción y para cambiar el tiempo de enjuague.

Pulse para seleccionar/iniciar la opción.

La pantalla de Proceso de enjuague aparece e indica el progreso de la operación de enjuague. Cuando termina la operación aparece la pantalla de enjuague finalizado.

Nota: El enjuague de la jeringa es manual. Mantener el botón de agua pulsado durante todo el proceso de enjuague.

Pulse (SELECCIONAR) para volver a la pantalla de Selección de enjuague.


Use para destacar Salir y luego pulse para seleccionar. Aparece el menú de Operaciones de enjuague.

Use para destacar Salir y pulse para seleccionar y volver al Inicio.

Nota: Todas las piezas de mano deben devolverse a sus soportes para salir de la operación de enjuague.

Utilización de las pantallas de control de las piezas de mano inteligentes:

Turbina de aire en modo normal

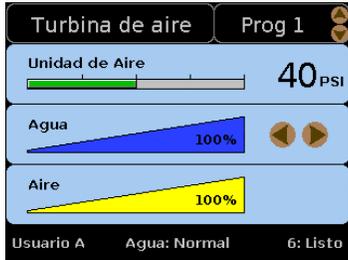

Aparece cuando se tira de una pieza de mano de la Turbina de aire.
Controles activos: Nombre de preselección y Ajuste de agua.

En modo Normal:

Pulse para cambiar la preselección activa, si lo desea.

Pulse para cambiar el ajuste activo.

Pulse para cambiar entre los modos Normal y Edit (Edición).

en modo Edit (Edición):
(no se muestra la pantalla)

Las flechas de ayuda y un destaque aparecen en los controles activos.

Pulse para activar una configuración de control diferente.


Pulse para cambiar el ajuste activo (destacado).

- Cuando la opción de guardar automáticamente está activada, los cambios realizados en la pantalla se guardan automáticamente en la Preselección indicada. Consulte la Configuración de usuario para saber cómo activar/desactivar el guardado automático.
- Pise el pedal para hacer funcionar una pieza de mano de la que haya tirado.

Observe el estado del agua en las pantallas. Use para cambiar el agua a Normal (controlada por el interruptor de selección en el pedal de control) u Encendido.

Guardar los ajustes de control cuando la opción de guardar preselecciones automáticamente está desactivada...

- Mantenga pulsado (durante 2 s) mientras Preselección # parpadea alternativamente hasta el mensaje ¿Guardar? .
- Un mensaje intermitente aparece en la parte inferior de la pantalla para indicar, Configuración guardada, y a continuación vuelve a la normalidad.
- Si no guarda la configuración modificada, el mensaje de ¿Guardar? sigue parpadeando.

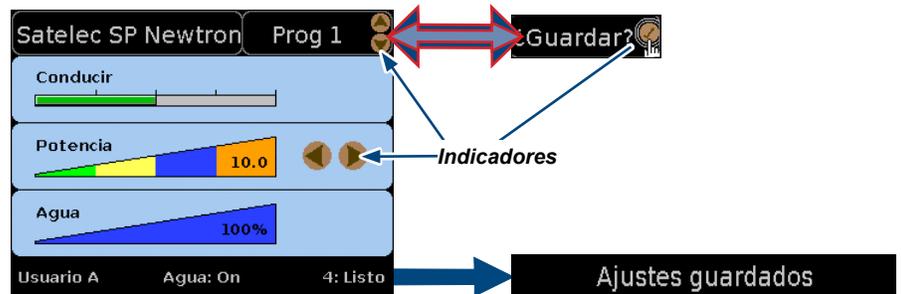

Nota:

La opción por defecto es guardar automáticamente la preselección, es decir, en cuanto se modifica un ajuste se guarda automáticamente como preselección activa para el usuario activo. ACTIVE o DESACTIVE la opción desde el menú de configuración del usuario.

Pantalla de control del motor eléctrico Bien Air - Modo EDICIÓN

Aparece cuando se tira de una pieza de mano Bien Air y se pulsa .

Nombre de la pieza de mano

Velocidad - el valor mostrado son las rpm máximas al ralentí y las rpm reales cuando se pulsa el pedal
Barra azul - indica la velocidad
Barra verde - indica el par de torsión

Par de torsión -

% del máximo Valor del par de torsión
Opciones Autoapagado/Marcha adelante automática/Marcha atrás automática
Tiempo de encendido automático - aparece solo para Marcha adelante automática

Agua - muestra el % de flujo

el relleno azul muestra el flujo real **Nota: En el entorno Endo se fuerza el apagado del agua.**



Nombre de preselección - hasta 10 preselecciones por usuario

Oper / Endo - cambio de entorno

Proporción de contrángulo - el color y la proporción de marcha de la pantalla de ajustes debe siempre coincidir con el color y la proporción grabados en el contrángulo que se está usando.

En ascenso Directo En descenso

Dirección rotatoria del motor -

Adelante (Azul) Atrás (Rojo)

Luz - conmuta

Luz APAGADA Luz ENCENDIDA

Motor eléctrico Bien Air - Pantalla de selecciones de proporción

aparece cuando en el modo Edit (Edición) está activo 1:1 y se pulsa + .

Ver y elegir proporciones que mostrar

Las proporciones con una X son las disponibles de las opciones de Proporción de contrángulo mostradas en el modo edición.

Añadir una proporción personalizada



Indicadores

Pantalla de Error



Aparece cuando se detecta un error. Siga las instrucciones en pantalla. Si el error es específico de una pieza de mano en concreto, el funcionamiento de otras piezas de mano no debería verse afectado.

Versiones de software
v1.3.x y v2.0.x