

La schermata iniziale compare quando l'interruttore principale è in posizione Acceso; le icone compaiono quando il software comunica con ciascuna di esse.




Icone dei componenti



Icone di stato Pronto Problema Assenza di comunicazione Opzione non connessa | I componenti sono funzionanti solo quando presentano il simbolo

Configurazione/ Selezione Prog / Nomina prog per accedere. (Ciascun utente ha una Configurazione.)

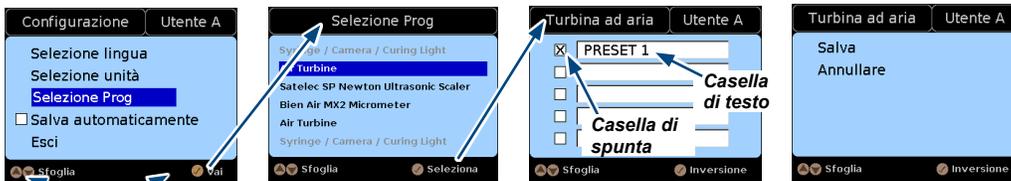

Attivare Salva automaticamente (= ACCESO (predefinito)) Tutte le impostazioni di controllo modificate vengono salvate automaticamente nell'Utente/Prog visualizzato. SPENTO (= SPENTO) Modificare le impostazioni più volte senza salvarle oppure premere il comando Salva per salvarle nell'Utente/Prog.

Suggerimento: Guardare le frecce di aiuto per sapere quali sono i pulsanti attivi per ciascuna schermata.

evidenzia la Selezione Prog desiderata e passa alla schermata Selezione Prog.

evidenzia il manipolo desiderato e passa alla schermata *nomina prog*.

Premere e per passare alla casella di spunta desiderata e premere per applicare una X.

Premere per spostare il cursore nella casella di testo, quindi premere per scorrere tra le lettere/i caratteri finché non compare il carattere desiderato.


Premere per passare al carattere successivo e premere per scorrere tra i caratteri/le lettere finché non compare il carattere/la lettera desiderato/a.

Ripetere questa operazione finché l'intero nome del programma non viene visualizzato nella casella di testo.

Premere per tornare alla casella di spunta, POI premere più volte per scorrere tra tutti i nomi dei programmi nella schermata Salva / Annullare.

Nota: inserire i nomi utenti usando una procedura simile a quella in Menu Configurazione/Selezione utente, ai quali si accede premendo + .

Programmazione delle posizioni della poltrona

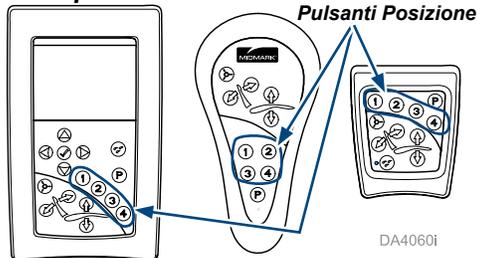

Usare i pulsanti e su qualsiasi dispositivo di controllo per portare la poltrona nella posizione desiderata.

Tenere premuto un tasto di posizione (1 2 3 o 4) per due secondi.


Attendere che la poltrona emetta il segnale acustico per tre volte. (a indicazione del fatto che la posizione corrente è stata programmata nel pulsante.)

Usare i pulsanti e per portare la poltrona in una posizione diversa.

Premere il pulsante appena programmato e verificare che la poltrona si porti nella posizione corretta.

Nota: ogni utente può programmare il proprio gruppo di posizioni della poltrona. Notare sempre qual è l'utente attivo nella schermata prima di richiamare una posizione programmata.

Schermate Operazioni di risciacquo

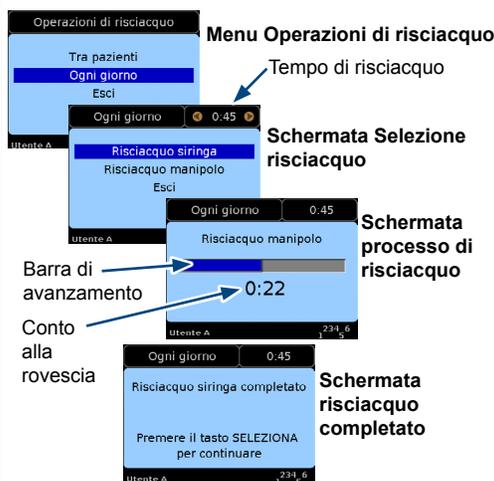

Il menu compare quando vengono sollevati due o più manipoli intelligenti.

evidenzia un'opzione e la selezione.

Compare la schermata Selezione risciacquo.

Premere per evidenziare un'opzione e per modificare il tempo di risciacquo.

Premere per selezionare/avviare l'opzione.

Viene visualizzata la schermata del processo di risciacquo, indicando lo stato di avanzamento dell'operazione di risciacquo.

La schermata Risciacquo completato viene visualizzata quando l'operazione di risciacquo è terminata.

Nota: Il risciacquo della siringa è manuale. Tenere premuto il pulsante dell'acqua per l'intera durata del processo di risciacquo.

Premere (SELEZIONA) per tornare alla schermata Selezione risciacquo.

Usare per evidenziare Esci e premere per selezionare.


Compare il menu Operazioni di risciacquo.

Usare per evidenziare Esci e premere per selezionarlo e tornare alla schermata iniziale.

Nota: Per uscire dall'operazione di risciacquo tutti i manipoli devono essere riposti sugli alloggiamenti.

Utilizzo delle schermate di controllo dei manipoli intelligenti:

Turbina ad aria nella modalità Normale

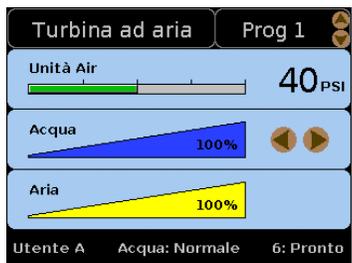

Compare quando viene sollevato un manipolo della turbina ad aria.
Controlli attivi: Nome prog e Impostazione acqua.

In modalità Normale:

Premere per modificare il programma attivo, se lo si desidera.
Premere per modificare l'impostazione attiva.

Premere per alternare le modalità Normale e Modifica.

In modalità Modifica:
(schermata non mostrata)


Sui controlli attivi compaiono le Frecche di aiuto e l'evidenziatura.
Premere per attivare un'impostazione di controllo differente.
Premere per modificare l'impostazione attiva (evidenziata).

- Quando Salva automaticamente è attivo, le modifiche effettuate su una schermata vengono automaticamente salvate nel programma mostrato. Vedi Configurazione per le modalità di attivazione e disattivazione di Salva automaticamente.
- Premere il pedale per utilizzare il manipolo sollevato.

Osservare lo stato dell'acqua sulle schermate. Usare per alternare l'acqua fra le modalità Normale (controllata dal selettore sul pedale) e On.

Salvataggio delle impostazioni di controllo quando Salva automaticamente è disattivato...

- Tenere premuto (per 2 sec.) quando Prog # lampeggia alternativamente con il comando Salva? .
- Un messaggio lampeggia in fondo alla schermata per segnalare Impostazioni salvate, quindi torna alla modalità normale.
- Se non si salvano le impostazioni modificate, il comando Salva? continua a lampeggiare.

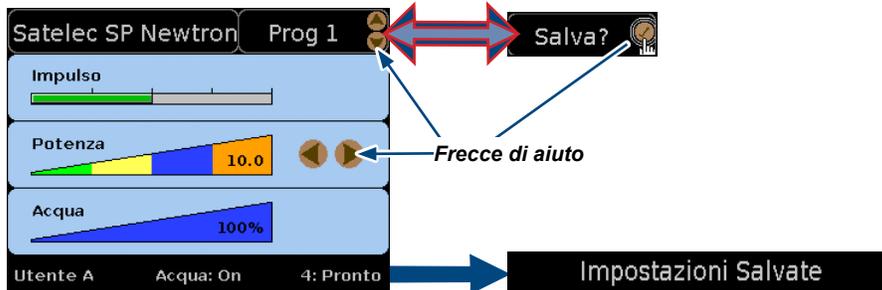

Nota:

L'opzione predefinita è Salva automaticamente, ovvero non appena si modifica un'impostazione essa viene automaticamente salvata come programma attivo per l'utente attivo. Attivare o disattivare l'opzione dal menu Configurazione.

Schermata di controllo motore elettrico Bien Air - Modalità MODIFICA

Compare quando viene sollevato un manipolo Bien Air e viene premuto .

Nome del manipolo

Velocità - il valore mostrato sono i giri/min (rpm) max. al regime minimo e i giri/min effettivi quando si preme il pedale

La barra blu indica la velocità

La barra verde indica la coppia

Coppia

% del valore massimo della coppia

Opzioni Auto Off / Auto Avanti / Auto Invertire

Il tempo Auto On compare solo per Auto Avanti

Acqua

mostra la % del flusso

Il riempimento blu indica il flusso effettivo

Nota: nell'ambiente Endo l'acqua rimane su Off (chiusa).

Nome programma - fino a 10 programmi per ciascun utente

Oper / Endo - commutazione ambiente

Rapporto di contrangolo - il colore e il rapporto indicati nell'impostazione su schermo devono sempre coincidere con il rapporto e il colore incisi sul contrangolo utilizzato.


Aumento Diretto Diminuzione

Direzione di rotazione del motore -

Avanti (Blu) Inversa (Rosso)

Luce - Commutazione

Luce OFF Luce ON

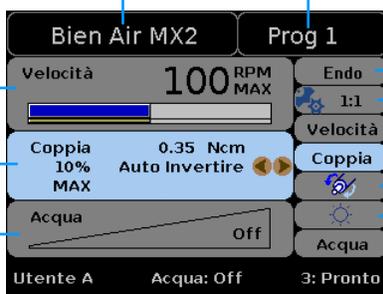

La schermata Motore elettrico Bien Air - Selezione rapporto

compare quando in modalità Modifica 1:1 è attivo e + vengono premuti.

Vedere e scegliere i rapporti da visualizzare


I rapporti con una X sono quelli disponibili tra le opzioni Rapporto contrangolo visualizzate in modalità Modifica.

Aggiunta di un rapporto personalizzato

Selezione rapporto		
<input checked="" type="checkbox"/> 1:5	<input checked="" type="checkbox"/> 10:1	<input type="checkbox"/> ??:?
<input checked="" type="checkbox"/> 1:4	<input checked="" type="checkbox"/> 20:1	<input type="checkbox"/> ??:?
<input checked="" type="checkbox"/> 1:2	<input checked="" type="checkbox"/> 22:1	<input type="checkbox"/> ??:?
<input checked="" type="checkbox"/> 1:1	<input checked="" type="checkbox"/> 30:1	Salva
<input checked="" type="checkbox"/> 7:1	<input checked="" type="checkbox"/> 100:1	Annullare

Frecche di aiuto Seguinte Nascondi

Schermata di errore

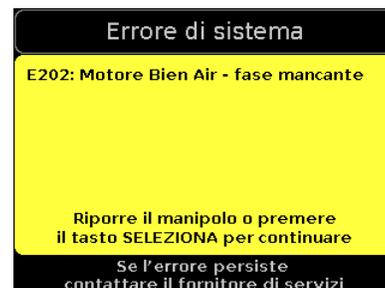

Compare quando viene rilevato un errore. Seguire le istruzioni su schermo. Se l'errore è specifico di un manipolo, il funzionamento degli altri manipoli non dovrebbe esserne interessato.

Versione software
v1.3.x & v2.0.x