

## Entretien quotidien

### A. Remplacer les contenants de récupération

Les contenants de récupération Midmark sont conçus pour un usage unique et un seul patient. Consulter les instructions du fabricant des contenants de récupération pour savoir comment les remplacer.

## Deux fois par an

### A. Nettoyer les prises d'air au niveau des moteurs

Débrancher l'alimentation électrique. Essuyer avec un chiffon propre pour enlever la poussière et les débris.

## Une fois par an

### A. Remplacer le filtre d'aspiration

La procédure est fournie dans ce guide.

### B. Évacuer l'humidité du réservoir

Ouvrir le robinet de service pour évacuer l'humidité accumulée dans le réservoir.

## Le cas échéant

### A. Rinçage de la pompe d'aspiration

La ou les pompes d'aspiration peuvent être rincées pour éliminer les dépôts qui s'accumulent sur les aubes de la pompe au fil du temps. L'élimination de ces dépôts contribuera à assurer le bon fonctionnement des aubes. Contacter le technicien de maintenance Midmark.

### B. Ajuster les points de consigne d'aspiration

Ajuster les points de consigne d'aspiration lors de la configuration initiale ou le cas échéant. La procédure est fournie dans ce guide.

### Point de consigne bas.


Ajuster la limite basse si le système ne s'est pas mis en marche à 13" Hg.

- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser la valeur mesurée.
- En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la valeur mesurée augmente.

### Plage d'aspiration..

Ajuster la plage d'aspiration si le système ne s'est pas arrêté à 20" Hg.

- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser la valeur mesurée.
- En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la valeur mesurée augmente.

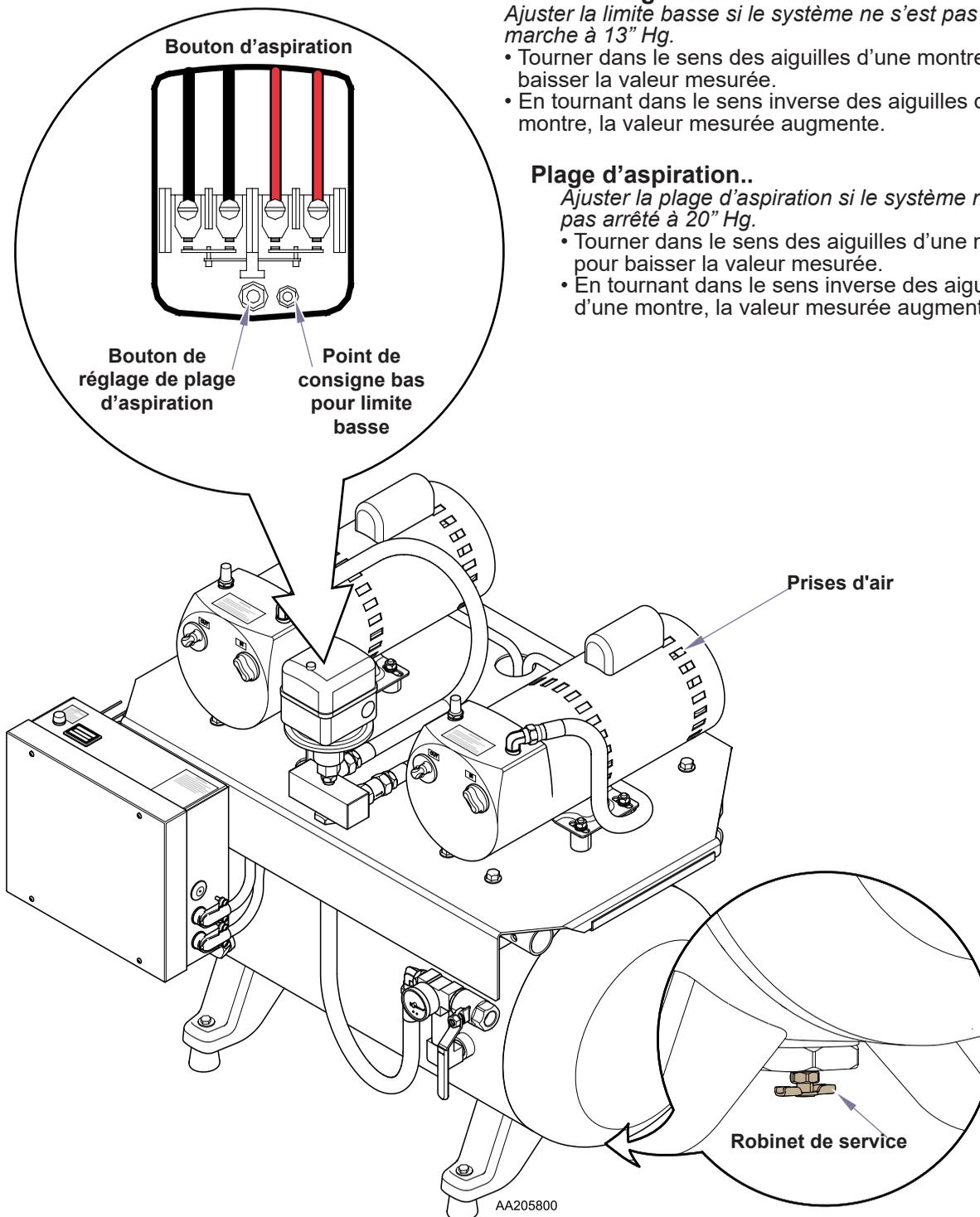

## Kits d'entretien

### Filtre d'aspiration

Réf : 77000796

Comprend :

- 1 filtre (en commander deux par tête)

### Solvant de rinçage

Réf : 77000699

## Accessoires

### Échappement

(PM-1 et PM-3) Réf : 77000894

(PM-4) Réf : 77000895

Comprend :

Kit d'échappement pour permettre d'évacuer l'air du PowerMax vers l'extérieur.

### Pack salle d'opération salle de réveil

Réf : 77008037

Comprend :

- Lot de 5 contenants jetables (1 200 cc)
- Régulateur de débit libre DISS
- Station de sortie : DISS d'inspiration
- Conduite conductrice - 6'
- Glissement et anneau d'aspiration
- Coude de rechange

### Contenants jetables (1 200 cm<sup>3</sup>)

Réf : 002-1882-00


Comprend :

- Lot de 5 contenants

Midmark Corporation  
60 Vista Drive  
Versailles, OH 45380 États-Unis  
1.800.643.6275  
1.937.526.3662  
[midmark.com](http://midmark.com)

# Remplacement du filtre

- Couper l'alimentation au niveau du boîtier d'alimentation.
- Purger le réservoir en fermant le robinet sphérique et en ouvrant le robinet de service.
- Laisser refroidir la ou les pompes.
- Dévisser l'embout de la ou des pompes.
- Retirer le ou les filtres et joints toriques.
- Remplacer par de nouveaux filtres et joints toriques.

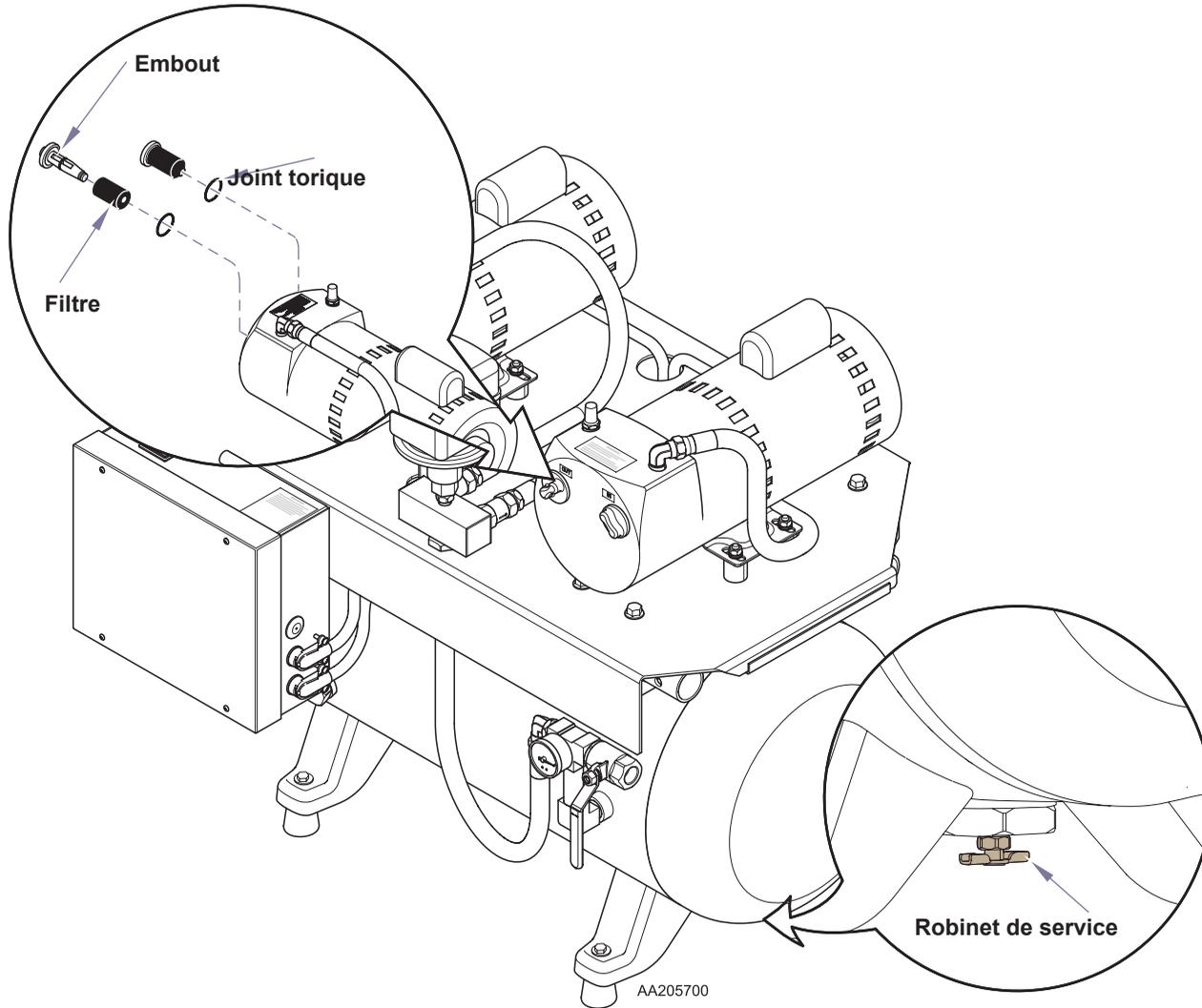

### Guide d'entretien

*Pour vous assurer de pouvoir utiliser cet appareil en toute fiabilité pendant plusieurs années, suivez les instructions d'entretien fournies dans ce guide. Si une réparation est nécessaire, contacter un revendeur Midmark agréé.*

Revendeur (nom/numéro de téléphone) :

---

---

---

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

### Journal d'entretien annuel

Date :      Prestations réalisées :      Technicien :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Renseignements sur la garantie



SCAN ME

### Enregistrement de garantie



SCAN ME