

Entretien quotidien

A. Nettoyer le système de tuyauterie d'aspiration.

Nettoyer le système de tuyauterie avec un nettoyant non moussant pour système d'aspiration. Midmark recommande d'utiliser Precision Clense™, Réf. 77000570.

Remarque : pendant les deux premières semaines d'utilisation du nettoyant Precision Clense, rincer les conduites à l'eau au début de la journée et vérifier les siphons deux fois par jour. Après les deux premières semaines, rincer à l'eau et vérifier les siphons lorsque cela s'avère nécessaire.

- 1) Commencer par la salle de soins la plus éloignée de l'aspirateur.
 - 2) Solution de nettoyage pour système d'aspiration (suivre les instructions de mélange fournies avec le nettoyant pour système d'aspiration).
- Remarque : pendant le nettoyage, alterner entre l'air et le vide ; immerger et retirer les conduites HVE et SE du mélange à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mélange.
- 3) Laisser les conduites d'aspiration nettoyées (HVE et SE) ouvertes et passer à la salle de soins suivante.
 - 4) Répéter les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que toutes les conduites d'aspiration soient nettoyées.

B. Nettoyer le filtre d'entrée d'aspiration.

Mettre l'aspirateur en position « OFF ». Retirer, remplacer et/ou nettoyer le bol du filtre, le tamis et le joint. Remonter le système. Mettre l'aspirateur en position « ON ».

Une fois par an

A. Nettoyer et/ou remplacer le filtre du clapet de décharge de l'aspirateur.

Retirer le filtre de l'embout. Purger le filtre et le remplacer s'il est endommagé. Remplacer le filtre dans le bouchon d'extrémité du clapet de décharge.

B. Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau.

Mettre l'aspirateur en position « OFF ». Retirer le bouchon du boîtier du filtre en « Y » et retirer le filtre d'arrivée d'eau. Rincer à l'eau et sécher. Remplacer le filtre et le bouchon. Mettre l'aspirateur en position « ON ».

C. Nettoyer/dépoussiérer la ou les pompes d'aspiration.

Essuyer avec un chiffon propre pour enlever la poussière et les débris.




Avertissement concernant l'équipement

Le nettoyage de la pâte d'abrasion avec des produits abrasifs, le fonctionnement de la pompe sans alimentation en eau, l'utilisation d'une eau avec une forte teneur en minéraux ou d'une eau avec une teneur excessive en sédiments peuvent endommager la pompe ou en réduire la durée de vie et n'est pas considéré comme un défaut de matériau ou de fabrication.

Remarque - Modèles de recycleur uniquement

Si l'aspiration est faible ou nulle en raison d'un engorgement dû à l'accumulation de résidus au fil du temps, il existe une fonction sur l'aspirateur pour le maintenir en fonctionnement jusqu'à ce qu'un technicien de maintenance puisse résoudre le problème. Tourner la vanne de dérivation d'eau en position OUVRETE. Cela contournera le recycleur et pourra maintenir la pompe en marche.

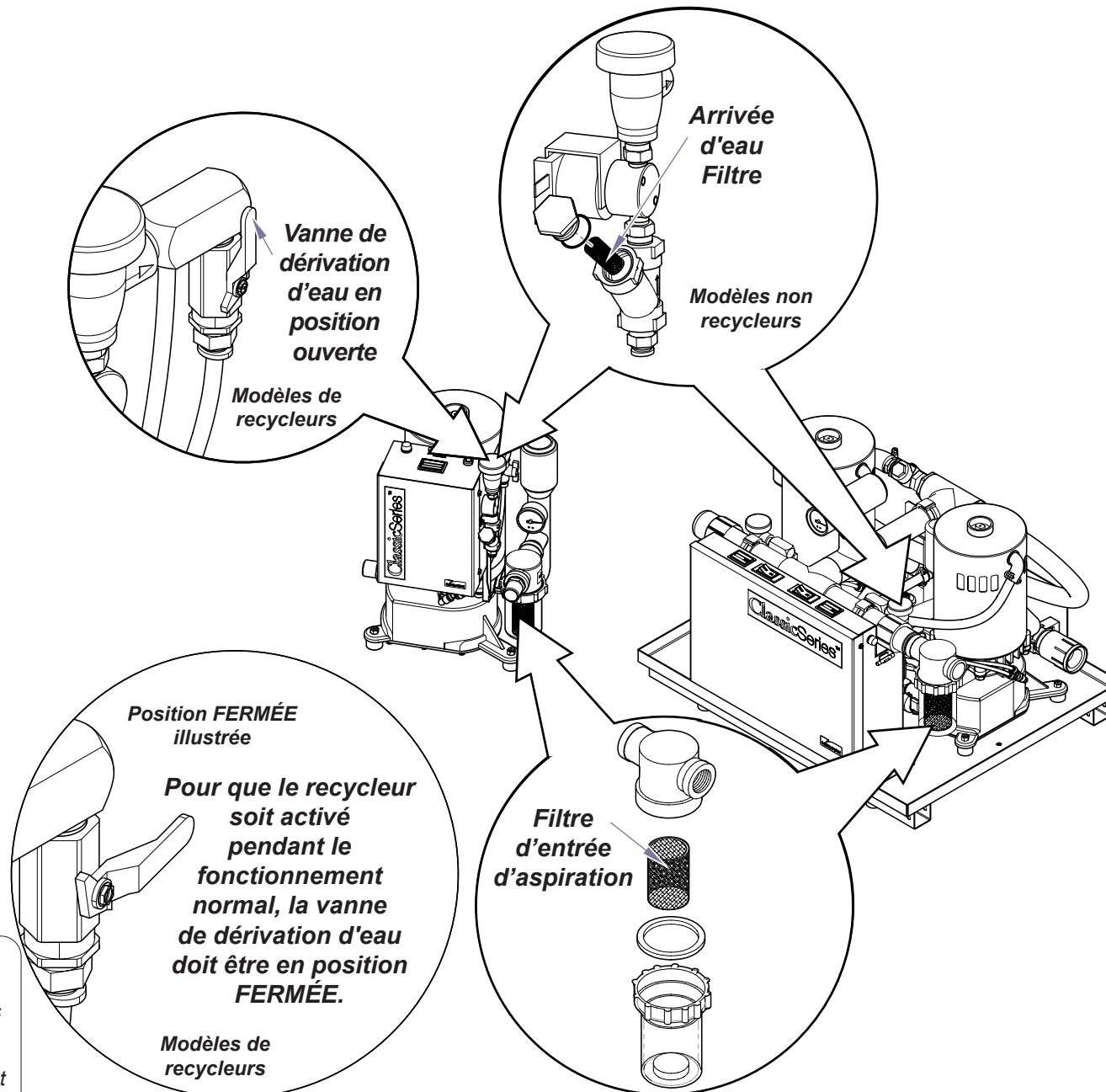

Kits d'entretien



Filtre de clapet de décharge de l'aspirateur

Réf : 62935601

Comprend :
• Filtre



Dispos-A-Bowl

Réf :

Modèles simples - 77005167

Modèles doubles - 77005168

Comprend :
• Contenant, couvercle et ruban de sécurité rouge.

Accessoires



Silencieux d'échappement

Réf : 77000040

Comprend :
• Aspirateurs simples uniquement



Pack de filtration de substances minérales

Réf : AVA82000


Comprend :
• Instructions d'installation, boîtier, cartouche, tout le matériel de montage et d'installation nécessaire.

Réf : PFM82000


Comprend :
• Cartouche pour filtration de substances minérales.

Procédure de réglage du niveau d'aspiration

Remarque : Le clapet de décharge de l'aspirateur est configuré en usine sur 10" Hg. Effectuez la procédure « Réglage du niveau du niveau d'aspiration » si un réglage est nécessaire. Ne réglez jamais le clapet de décharge au-dessus de 12" Hg sur la jauge de vide.

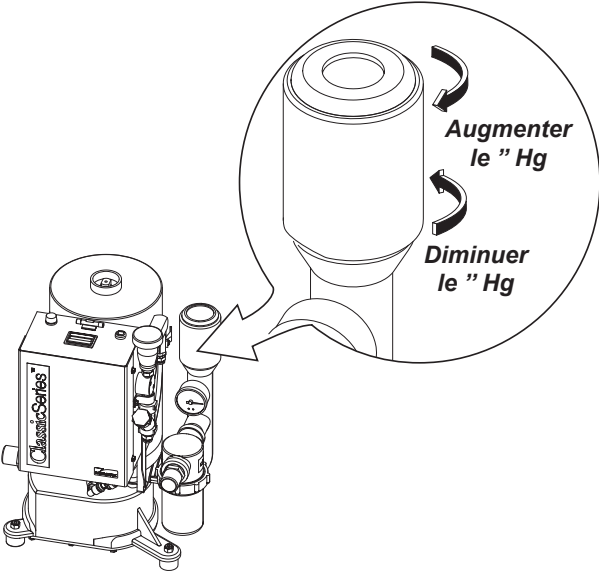


- A. Tourner le cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le "Hg.
- B. Tourner le cylindre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le "Hg.

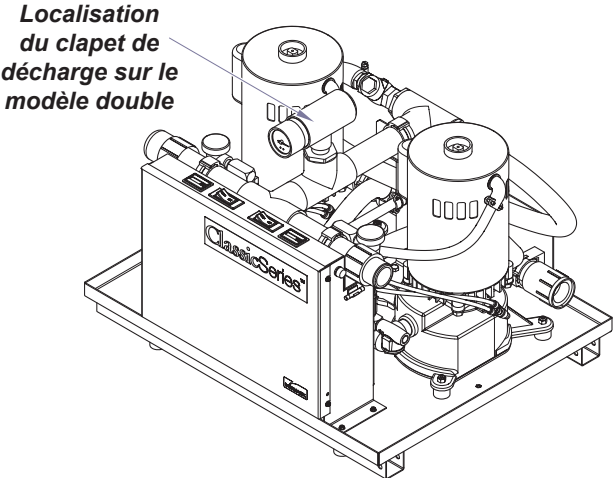


Filtre du clapet de décharge de l'aspirateur

Modèle simples

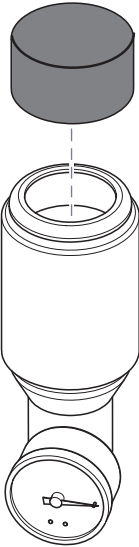

Retirer le filtre de l'embout du clapet de décharge de l'aspirateur pour le nettoyer ou le remplacer.

Modèle double

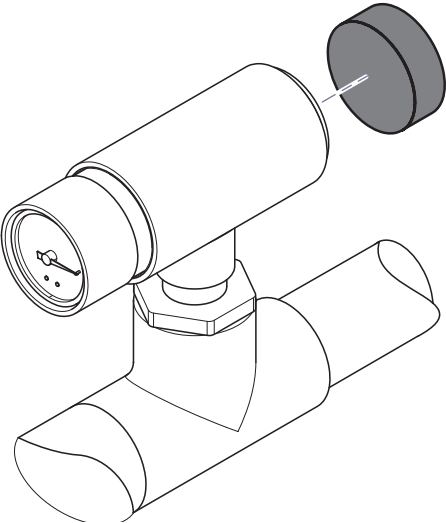

Renseignements sur la garantie



Enregistrement de garantie



Aspirateurs à anneau liquide Classic Series®

Guide d'entretien

Pour vous assurer de pouvoir utiliser cet appareil en toute fiabilité pendant plusieurs années, suivez les instructions d'entretien fournies dans ce guide. Si une réparation est nécessaire, contacter un revendeur Midmark agréé.

Revendeur (nom/numéro de téléphone) :

Numéro de modèle : _____
Numéro de série : _____
Date d'achat : _____

Journal d'entretien annuel

Date : Prestations réalisées : Technicien :

